

PILULIER ELECTRONIQUE

Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement la notice avant toute utilisation. Notice à conserver.

Le pilulier électronique portable (référence 33998) a été conçu pour organiser la prise de médicaments et programmer des alarmes.

Caractéristiques techniques :

Un pilulier composé de 4 compartiments.

Modèle électronique pour programmer jusqu'à 5 alarmes quotidiennes : alarme sonore (80 dB) et vibreur.

Un écran digital pour l'affichage de l'heure, des alarmes et d'un mode Timer (Minuterie).


Alimentation : 1 pile CR2032 (fournie).

Attention : le pilulier hebdomadaire n'est pas un dispositif médical. C'est un accessoire pour organiser la prise de médicaments.

1 : Ecran digital

2 : Son de l'alarme


3,4 et 5 : Boutons de réglages

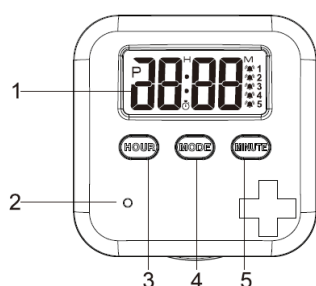

6 : Piles

7 : Compartiments

8 : Ouverture du couvercle

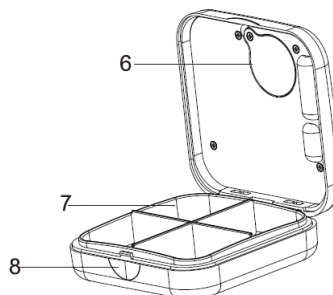

Utilisation et installation des piles :

Ouvrir le pilulier et tirer sur la protection plastique située sous la pile. Refermer le couvercle : l'écran s'allume et affiche 12 :00.

Pour changer la pile : utiliser un tournevis cruciforme pour ôter la vis du couvercle du compartiment à piles et insérer 1 pile CR2032. Respecter les polarités (Le + orienté vers l'extérieur). Replacer le couvercle correctement.

Attention : lors du changement de pile, l'horaire n'est pas enregistré.


Réglages

En mode affichage normal (hors réglages) l'écran affiche l'heure fixe et « : » clignote.


Réglage de l'heure :

En mode affichage normal, effectuer un appui long sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que l'horaire clignote. Appuyer sur le bouton **HOUR** pour régler l'heure puis sur le bouton **MIN** pour régler les minutes. Puis effectuer un appui court sur le bouton **MODE** pour valider le paramétrage et revenir à l'affichage normal.

Réglages de l'heure des alarmes :

En mode affichage normal, effectuer un appui court sur le bouton **MODE**. L'écran affiche « - - : - - » et l'icône  **1** apparaît en haut à droite de l'écran (cela correspond à l'alarme 1). Effectuer un appui long sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que l'écran clignote. Appuyer sur le bouton **HOUR** pour régler l'heure de l'alarme puis sur le bouton **MIN** pour régler les minutes de l'alarme 1.

Effectuer un appui court sur le bouton **MODE** pour valider le réglage de l'alarme 1. L'affichage devient fixe.

Appuyer sur le bouton **MODE** (appui court) pour passer au réglage de l'alarme 2 (l'icône  **2** apparaît en haut à droite de l'écran) et répéter l'étape précédente. Suivre ainsi l'étape précédente pour les autres alarmes (jusqu'à 5 alarmes programmables).

Après le paramétrage de la dernière alarme, effectuer 2 appuis courts sur le bouton **MODE** pour revenir à l'affichage normal. Les icônes des alarmes programmées apparaissent sur le côté droit de l'écran.

Attention : si pendant les réglages, aucun bouton n'est activé pendant une minute, l'écran retourne à l'affichage normal.

Alarmes :

Lorsqu'une alarme est activée :

- Le pilulier émet une alarme sonore (80 dB) et vibre pendant 10 secondes.
- Puis la sonnerie uniquement s'intensifie pendant 30 secondes.
- Et la sonnerie et le vibreur sont plus rapides pendant 20 secondes.

Appuyer sur un bouton pour arrêter l'alarme ou l'alarme s'arrête automatiquement après une minute.

Activer/ désactiver les alarmes :

Lors de la programmation d'un horaire d'alarme, cette dernière est automatiquement activée.

Pour désactiver une alarme :

En mode affichage normal, effectuer un appui court sur le bouton **MODE** jusqu'à la sélection de l'alarme à désactiver (l'icône correspondante s'affiche à droite de l'écran) puis appuyer sur le bouton **MIN**. L'écran affiche « - - : - - ». Puis effectuer un appui court sur le bouton **MODE** pour confirmer la désactivation de l'alarme. Procéder ainsi pour les autres alarmes à désactiver jusqu'à revenir au mode affichage normal.

En mode affichage normal : les icônes des alarmes désactivées n'apparaissent pas sur le côté droit de l'écran.

Réglage du format de l'heure :

Pour choisir le format de l'heure (12H ou 24H) : en mode affichage normal, effectuer un appui court sur le bouton **HOURL**. « P » apparaît à gauche de l'écran pour indiquer l'horaire de midi à minuit.

Réglage du mode Minuterie

En mode affichage normal, effectuer plusieurs appuis courts sur le bouton **MODE** jusqu'à l'affichage



Effectuer un appui long sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que l'affichage clignote. Appuyer sur les boutons **HOURL** et **MIN** pour régler le temps souhaité (heure et minutes). Appuyer sur le bouton **MODE** pour valider. Puis appuyer sur le bouton **MIN** pour lancer le minuteur. L'alarme sera activée dès la fin du timer.

Lorsque l'icône  clignote, cela signifie que la minuterie est activée. Appuyer à nouveau sur **MIN** pour arrêter la minuterie.

Conditions d'utilisation et de sécurité

Utiliser le pilulier électronique pour l'usage prévu.

Ne pas placer le produit dans l'eau.

Ne pas modifier la structure du produit et ne pas le réparer vous-même.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise utilisation ou entretien.

Tenir hors de portée des enfants.

Résolutions des problèmes rencontrés :

Défauts constatés	Solutions
L'écran est faible ou ne s'allume pas.	Vérifier que les piles sont neuves et correctement installées. Changer les piles et respecter les polarités.
L'alarme est faible ou ne se déclenche pas.	Vérifier que les piles sont neuves et correctement installées. Vérifier que la fonction alarme est activée.
L'alarme ne sonne pas à l'heure souhaitée.	Vérifier l'horaire programmé de l'alarme et modifier si nécessaire. Vérifier que l'alarme est activée. Vérifier le format de l'horaire (12H ou 24H). Vérifier que le mode Timer (Minuterie) est désactivé.

NB : Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et sur la santé humaine. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à cet effet. Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques. Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales

