

BARRE D'APPUI À VENTOUSES



Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Notice à conserver. En cas de perte, vous la retrouverez sur www.mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr. • Référence produit : 34016

DESCRIPTIF DU PRODUIT



INSTALLATION

Aucun outil n'est nécessaire pour installer ou retirer votre barre d'appui à ventouses.

Comment installer votre barre d'appui à ventouses ?

Etape 1

Vérifiez les ventouses de succion et la surface où la barre d'appui sera posée • Nettoyer soigneusement la surface • Appuyez les ventouses en caoutchouc sur la surface. Les leviers de succion inclinables doivent être relâchés et chaque ventouse doit reposer complètement sur la surface • Sur une surface carrelée, assurez-vous que les ventouses ne chevauchent pas un joint. Les disques doivent être installés à plus de 10 mm des joints.

Etape 2

Appuyez sur le premier levier inclinable, puis sur le second. Vous devez clairement sentir la pression générée par le verrouillage en appuyant sur le

levier. Plus la résistance est grande, plus la force de la ventouse est importante

- Les témoins situés de chaque côté de la barre doivent passer du ROUGE au VERT. **Le VERT signifie que la barre est fermement fixée au mur**
- Avant chaque utilisation, vérifiez que tous les indicateurs sont au VERT. En cas de doute, ne pas hésiter à fixer de nouveau la barre
- Ne pas utiliser la barre si la fixation ne semble pas suffisante.

Comment retirer votre barre d'appui à ventouses ?

Relâchez les deux leviers de succion • Glissez votre doigt sous la ventouse pour la décoller.

ENTRETIEN

Gardez toujours les disques en caoutchouc des ventouses propres et sans résidu graisseux ou poussière • Nettoyez les disques en caoutchouc des ventouses avec un produit de nettoyage domestique ordinaire • Ne jamais exposer les disques en caoutchouc des ventouses au soleil pour une période prolongée sinon ils perdront de leur élasticité • Vérifiez les disques en caoutchouc des ventouses pour toute détérioration possible.

CONDITIONS D'UTILISATION ET SECURITE

La barre ne doit être utilisée que pour maintenir l'équilibre et pas pour se lever. Elle n'est pas conçue pour supporter tout le poids du corps.

ATTENTION : LA QUALITE DU MUR ET DES REVETEMENTS, DOIVENT ETRE ABSOLUMENT LISSES, SECS ET SANS ASPERITE (TELS QUE LE CARRELAGE)

Toujours vérifier la bonne fixation de la barre avant utilisation, en cas de doute, ne pas hésitez à la fixer de nouveau • Tester la solidité de la fixation de la barre à chaque installation afin d'éviter les accidents • Ne pas stocker ni utiliser dehors • Ne pas utiliser dans un autre but que celui pour lequel ce produit est prévu • Ne pas exercer une traction supérieure à 45 kg sur la poignée • Ne pas modifier cet article. En cas de nécessité, n'utiliser que des pièces originales pour le réparer. Seul un personnel qualifié est habilité à réparer cet article • En cas de non utilisation prolongée, rapprochez-vous de votre pharmacien mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr.