

# POCHE DE FROID

## INSTANTANÉ

### ALBA

mon-materiel-  
medical-en-  
pharmacie.fr

VOTRE  
PHARMACIEN  
VOUS CONSEILLE




**SOULAGE**  
LES DOULEURS



**LIMITE**  
L'APPARITION  
D'HEMATOMES



**USAGE UNIQUE**  
**NE PAS APPLIQUER DIRECTEMENT SUR LA PEAU**  
**PRÊT À L'EMPLOI**

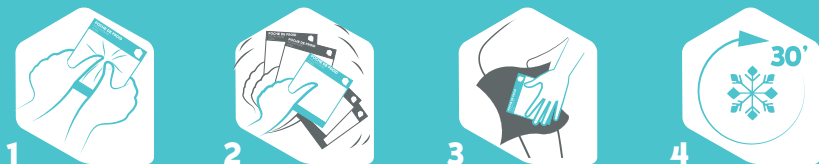

## INSTRUCTIONS :

1. Presser fermement pour rompre la capsule interne et activer le froid.
2. Agiter brièvement pour mélanger le contenu.
3. Envelopper la poche froide dans un vêtement et appliquer sur la zone douloureuse.
4. Assure environ 30 minutes de froid.

## USAGE PRÉVU :

La poche de froid instantané soulage et apaise les douleurs causées par des entorses, des contusions, des brûlures mineures, des maux de dents ou des piqûres d'insectes.  
Elle permet aussi de limiter l'apparition d'hématomes.

## APPLICATION EXTERNE UNIQUEMENT

**ATTENTION :** Toujours envelopper dans une serviette ou un tissu avant l'application. Ne pas congeler ou réfrigérer pour la réutiliser, car cela pourrait entraîner des engelures. Ne pas utiliser sur des personnes présentant une déficience sensorielle. Avant utilisation, conserver à température ambiante. Le stockage à des températures plus basses pourrait causer des engelures après l'activation. Conserver dans un endroit sec. Le produit est plus efficace s'il est activé entre 0°C et 26°C.

**AVERTISSEMENT :** Tenir hors de portée des enfants. Nocif en cas d'ingestion. En cas d'ingestion accidentelle, contactez immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas percer le sac extérieur. Si le sac se perce et que le liquide entre en contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement à l'eau et appeler un médecin. Ne pas mélanger avec des matériaux combustibles. Dispositif médical de classe 1.

**CONTIENT :** urée, eau

REF 7112

2024-05-15  
2028-05-14  
C.200002443



MedNet EC-REP GmbH  
Borkstrasse 10, 48163  
Muenster, Germany



INTCO MEDICAL (HK) Co., LTD  
FLAT/RM 19C, LOCKHART CENTRE, 301-307 LOCKHART ROAD,  
WAN CHAI, HONG KONG +86 511 83174088  
AMADIS 12 Rue des colzas - 85110 CHANTONNAY - FRANCE