

ROLLATOR 2 ROUES OLYMPE

mon-materiel-
medical-en-
pharmacie.fr

VOTRE
PHARMACIEN
VOUS CONSEILLERA

Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Notice à conserver • En cas de perte, vous la retrouverez sur www.mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr • Référence produit : 45984

IMPORTANT

Lisez le manuel d'utilisation et les instructions d'installation avant le montage et l'utilisation du déambulateur/rollator. Respectez les avertissements de sécurité indiqués et assurez-vous que seules les personnes familiarisées avec ceux-ci peuvent utiliser le produit. Conservez le manuel pour une utilisation ultérieure et joignez-le si vous transférez le produit. Pour un usage en intérieur.

DÉSCRIPTION



1. Poignée
2. Siège
3. Ajusteur de hauteur
4. Roues

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR

Utilisez le réglage de la hauteur pour ajuster les poignées des deux côtés à la hauteur souhaitée.

Les poignées doivent être au niveau du poignet.

La hauteur de la poignée peut être ajustée grâce aux trous. Pour régler la hauteur, desserrez et retirez les vis des deux côtés et ajustez la barre à la hauteur souhaitée.

Fixez les deux vis dans le trou approprié.

SIÈGE

Le siège convient pour de courtes pauses mais ne peut être utilisé comme une chaise.

Assurez-vous d'utiliser le déambulateur uniquement pour les trajets avec lesquels vous êtes à l'aise. Vérifiez le déambulateur avant de vous asseoir pour éviter de vous pencher accidentellement.

Assurez-vous d'être le plus droit possible sur le siège.

PLIER LE ROLLATOR

Faites attention à ne pas vous pincer les mains lors du pliage.

Tirez le siège verticalement pour le replier. Cela pliera le déambulateur.



ENTRETIEN & MAINTENANCE


Assurez-vous que TOUTES les fixations soient sécurisées à TOUT moment.
Vérifiez que la vis fixant le siège à la fente latérale soit bien serrée.
Resserrez-la si nécessaire. Remplacez immédiatement toute pièce cassée, endommagée ou usée.

Entretien des accessoires à roulettes :

- 1. Nettoyez les roues avec de l'eau tiède et un nettoyant doux. Séchez-les avec un chiffon propre.
- 2. Lubrifiez périodiquement les roues avec de l'huile pour éviter les grincements.

CARACTÉRISTIQUES

Description	Dimensions
Poids maximal de l'utilisateur	115 kg
Poids du rollator	3.75kg
Largeur de siège (cm)	35,5
Profondeur de siège (cm)	23
Hauteur de siège (cm)	48,5
Largeur pliée (cm)	20
Taille de roue avant (cm)	15
Hauteur totale (cm)	78,5/88
Longueur totale (cm)	57
Largeur totale (cm)	58
Largeur entre les poignées (cm)	45

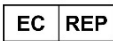

Obelis s.a.
Boulevard General Wahis 53 1030 Bruxelles, BELGIQUE

