

PILULIER HEBDOMADAIRE

mon-materiel-
medical-en-
pharmacie.fr

VOTRE
PHARMACIEN
VOUS CONSEILLE

Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Notice à conserver • En cas de perte, vous la retrouverez sur www.mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr • Référence produit : 33999

Le pilulier hebdomadaire a été conçu pour organiser la prise de médicaments.

Liste des éléments inclus :

Un socle avec l'indication des jours de la semaine.

7 boîtiers amovibles de 4 compartiments pour les prises quotidiennes.



Utilisation

Le pilulier est composé de 7 boîtiers détachables, avec 4 compartiments pour identifier le moment de la journée : matin, midi, soir, nuit.

Appuyer sur le bouton jaune correspondant au jour de la semaine pour libérer le boîtier quotidien. Placer les médicaments dans chaque boîtier et compartiment selon le jour et le moment de la journée. Refermer et replacer les boîtiers sur le socle.

Attention : le pilulier hebdomadaire n'est pas un dispositif médical. C'est un accessoire pour organiser la prise de médicaments.

Utiliser le pilulier hebdomadaire pour l'usage prévu.

Ne pas modifier la structure du produit et ne pas le réparer vous-même.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise utilisation ou entretien.

Tenir hors de portée enfants.

