

LOUPE MAINS LIBRES

mon-materiel-
medical-en-
pharmacie.fr

VOTRE
PHARMACIEN
VOUS CONSEILLERA

Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Notice à conserver • En cas de perte, vous la retrouverez sur www.mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr • Référence produit : 34007

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : L. 30 x P. 20,5 x H. 1.5cm (pliée) 11 cm (dépliée).
- Puissance de grossissement : x 2.5.
- Équipée de 12 LED blanches.
- La loupe peut être utilisée à plat sur le support de lecture, dépliée sur les 4 pieds ou autour du cou.




INSTALLATION

Double alimentation au choix : Piles (non fournies) ou câble USB (fourni)

Pour insérer les piles : ouvrir le couvercle du compartiment à piles et insérer 3 piles AAA LR03 (non fournies) et respecter les polarités. Remplacer le couvercle.

Fig. 1

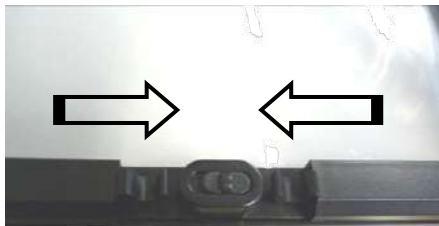

Déplier les pieds de la loupe

Pousser dans le sens indiqué pour faire glisser les pattes situées de chaque côté du bouton ON/ OFF comme indiqué (Fig.1).

Replier les pieds de la loupe

Pour replier la loupe, replier les pieds jusqu'au « clic » qui confirme le bon positionnement.

UTILISATION


L'utilisateur dispose de 3 modes d'utilisation au choix :

- Loupe pliée sur le support de lecture.
- Loupe avec les pieds dépliés au-dessus du support de lecture.
- Loupe autour du cou grâce au cordon intégré.

ATTENTION : SELON L'UTILISATION DE LA LOUPE, LA PUISSANCE DE GROSSISSEMENT PEUT VARIER.

Pour allumer les LED blanches, faire glisser le bouton sur la position « ON » comme indiqué (Fig. 2) et remettre en position « OFF » pour éteindre les LED.

Fig. 2

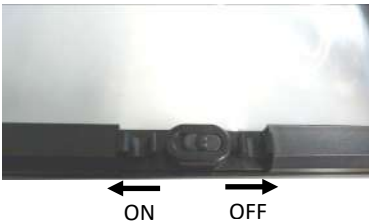

ATTENTION : LA LOUPE GEANTE MAINS-LIBRES N'EST PAS UN DISPOSITIF MEDICAL. C'EST UN ACCESSOIRE DE LECTURE.

CONDITIONS D'UTILISATION ET SÉCURITÉ

Utiliser la loupe pour l'usage prévu • Ne pas modifier la structure du produit et ne pas le réparer vous-même • Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise utilisation ou entretien • Tenir hors de portée des enfants • Ne pas utiliser de produits d'entretien contenant des agents caustiques ou abrasifs.

Résolutions des problèmes rencontrés

Défauts constatés	Solutions / comment résoudre le problème
Les LED ne fonctionnent pas.	Vérifier que le bouton est en position ON et que les piles sont correctement installées. Changer les piles.

NB : Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et sur la santé humaine. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers, mais dans les lieux de collecte prévus à cet effet. Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales.

 Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Ce produit doit être pris en charge par un système de collecte séparée conformément à la directive européenne 2012/19/CE. • Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

