

ENFILE CHAUSSETTES

mon-materiel-
medical-en-
pharmacie.fr

VOTRE
PHARMACIEN
VOUS CONSEILLE

Manuel d'utilisation





Merci de lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Notice à conserver • En cas de perte, vous la retrouverez sur www.mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr • Référence produit : 34012

Facile à utiliser, l'enfile chaussettes permet aux personnes qui ont un manque de mobilité ou de dextérité d'enfiler ses chaussettes, bas de contention ou collant sans se pencher, pour vous apporter un maximum de confort.



Conditions d'utilisation :

1. Enfiler le bas ou la chaussette sur l'enfile chaussettes jusqu'à ce que le fond vienne en contact avec le bout de l'enfile chaussettes.
2. Insérer le pied entre l'enfile chaussettes et la chaussette.
3. Tirer les bandes pour faire monter la chaussette le plus haut possible le long de la jambe.
4. Retirer l'enfile chaussettes.

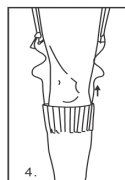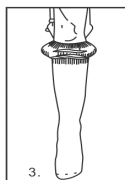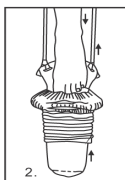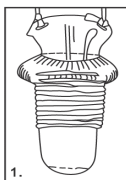

Dimensions : 23 x 14 x 90 cm

Extensible jusqu'à 90 cm

L'enfile chaussettes permet de mettre chaussettes et bas sans se pencher.

Il est idéal pour les personnes rencontrant des difficultés pour se baisser, souffrant du dos, ou ayant des difficultés de mouvements.

La structure en plastique est recouverte dans sa partie intérieure d'un tissu en nylon bleu qui facilite le glissement. La partie extérieure est recouverte d'un tissu éponge non-agressif pour ne pas risquer d'endommager la chaussette ou le bas.



Pour plus de conseils sur www.apesantval.com/produits/34012