

ROLLATOR 4 ROUES PANIER

Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Notice à conserver • En cas de perte, vous la retrouverez sur www.mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr • Référence produit : 37263

IMPORTANT

Lisez le manuel d'utilisation et les instructions d'installation avant le montage et l'utilisation du déambulateur. Respectez les avertissements de sécurité indiqués et assurez-vous que seules les personnes familiarisées avec ceux-ci peuvent utiliser le produit. Conservez le manuel pour une utilisation ultérieure et joignez-le si vous transférez le produit. Pour un usage en extérieur.

DÉSCRIPTION



1. Poignée
2. Plateau en plastique
3. Siège
4. Panier
5. Roues
6. Cadre
7. Frein

AVANT UTILISATION

À LA LIVRAISON

Déballez votre produit et vérifiez si la livraison est complète. Les éléments suivants doivent être inclus :

- Cadre de base avec siège, 4 roues ;
- Poignées réglables en hauteur avec freins ;
- Panier
- Plateau en plastique
- Manuel.

Vérifiez que votre produit n'a pas été endommagé pendant le transport. Si vous constatez des dommages après la livraison, contactez le transporteur.

RISQUE DE CHUTE

ATTENTION

Le déambulateur est conçu pour aider pendant la marche. N'utilisez pas le déambulateur si vous avez d'autres limitations physiques qui peuvent entraîner une utilisation dangereuse de votre déambulateur, comme un bras de sécurité, des discordants d'équilibre, ...

Le déambulateur est conçu et produit uniquement pour être utilisé comme une aide à la marche pour une personne d'un poids maximal de 130 kg.

Le déambulateur compensera le manque de soutien adéquat par les jambes en s'appuyant ou en se déplaçant avec lui.

Le déambulateur offrira une meilleure stabilité, un meilleur soutien et une meilleure sécurité lors de la marche.

Le déambulateur peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur.

Il n'est pas destiné au transport de marchandises et/ou de plus de personnes que l'utilisateur.

Il ne doit être utilisé que sur des surfaces où toutes les roues et les jambes touchent le sol. N'utilisez pas le déambulateur sur un terrain rocheux, bosselé ou sablonneux, ou dans des endroits fortement inclinés. Le déambulateur peut devenir instable.

Recherchez des zones plates et stables et des bordures biseautées pour marcher avec votre déambulateur.

Veuillez vérifier tous les détails techniques et les limites de votre déambulateur dans la partie « caractéristiques ». La garantie de ce produit est basée sur une utilisation et un entretien normaux tels que décrits dans ce manuel.

Les dommages causés à votre produit par une mauvaise utilisation ou un manque d'entretien entraîneront l'annulation de la garantie.

INSTRUCTION DE SÉCURITÉ

ATTENTION

Veillez lire et suivre les instructions de ce manuel. Sinon, vous risquez de vous blesser ou d'endommager votre déambulateur.

- Vérifiez qu'aucune pierre ou autre objet ne bloque les roues du déambulateur.
- Assurez-vous que les deux leviers de frein sont en mode stationnement avant d'utiliser le déambulateur pour vous aider à vous lever.
- Lorsque vous êtes debout confortablement et stable, vous pouvez déverrouiller les freins de stationnement.
- Pendant la marche, gardez les deux mains sur les poignées.
- Sachez que certaines parties de votre déambulateur peuvent devenir très chaudes ou froides en raison de la température ambiante, du rayonnement solaire, des appareils de chauffage, etc. Soyez prudent lorsque vous touchez.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que les poignées sont bien fixées.
- Ne tenez pas les poignées avec les mains mouillées. Si vous le faites, vous pouvez perdre votre adhérence et perdre votre équilibre.
- Ne vous engagez pas avec votre déambulateur dans la circulation. Restez toujours sur le trottoir.
- Prenez note des instructions d'entretien et de service. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par un entretien inapproprié.

EXPÉDITION ET STOCKAGE

L'expédition et le stockage du déambulateur doivent se dérouler conformément aux spécifications techniques. Assurez-vous que le déambulateur est rangé au sec.

Fournir une couverture ou un emballage suffisant pour protéger le déambulateur de la rouille et des corps étrangers (par exemple, l'eau salée, l'air marin, le sable, la poussière). Assurez-vous qu'aucun objet n'est rangé sur ou contre le déambulateur pour éviter tout dommage.

ASSEMBLAGE ET AJUSTEMENT

Assemblage

1. Faites glisser les poignées dans le cadre avant.
2. Si nécessaire, ajustez les câbles connectés aux freins.
3. Ajustez les poignées à la hauteur souhaitée.

Ajustement

Fixez fermement les poignées avant d'utiliser le déambulateur

Ajustement de la hauteur

Fixez fermement les poignées avant d'utiliser le déambulateur.

Ne dépassez pas le réglage minimum ou maximum indiqué sur les poignées. Votre déambulateur ne sera plus stable.

Utilisez les poignées de poussée uniquement parallèlement au sens de marche du déambulateur.

La hauteur du déambulateur peut être modifiée en ajustant les poignées :

1. Déverrouillez/relâchez le levier (1) sur le côté.
2. Faites glisser la poignée (2) vers le haut/bas dans le tube du cadre (3) jusqu'à la hauteur souhaitée.
3. Verrouillez à nouveau fermement la poignée.
4. Répétez l'opération pour l'autre poignée. Assurez-vous que les deux poignées ont été réglées à la même hauteur.



Ajustement des freins

La force des freins peut être réglée en desserrant/serrant la vis (4) à l'arrière du levier de frein.



Montage du panier

Ne surchargez pas le panier.

Le panier à provisions est destiné à être monté sur la face avant. Deux crochets permettent de fixer le panier à provisions sur le cadre du déambulateur.

UTILISATION DU ROLLATOR

Pliage et dépliage

Gardez les doigts, les bijoux et les vêtements à l'écart du mécanisme de pliage.

Vérifiez que le déambulateur est complètement ouvert et que le cadre est verrouillé.


1. Poussez le levier situé sur le côté droit du cadre supérieur (5) vers le haut.
2. Après avoir relâché le levier, tirez le tube (6) sous le siège.
3. Pour déplier le déambulateur, répétez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.



Système de freinage

Vérifiez le fonctionnement des freins pour assurer votre sécurité.

L'état des freins est influencé par l'usure, l'huile et d'autres contaminations des roues arrière et du mécanisme de freinage.

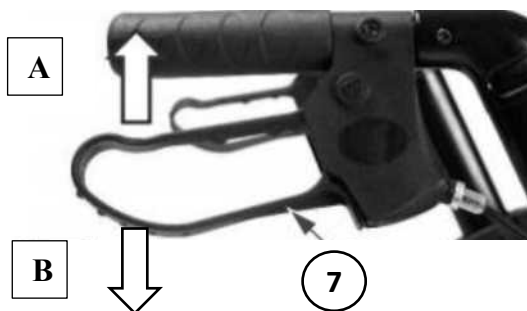

Le déambulateur est équipé de freins, actionnés par deux leviers de frein (7).

Les leviers de frein fonctionnent en deux modes : freins de fonctionnement et freins de stationnement.

Ne poussez pas trop fort sur le déambulateur lorsque vous utilisez les freins de fonctionnement. Cela pourrait endommager les pneus ou les freins.

Pour utiliser les freins de fonctionnement, tirez simultanément les deux leviers de frein (7) vers le haut [A] dans un mouvement de compression. Pour arrêter le freinage, relâchez les leviers de frein.

Pour utiliser les freins de stationnement, poussez les deux leviers de frein (7) vers le bas en position verrouillée [B]. Utilisez toujours les deux freins de stationnement simultanément. Pour mettre fin au mode de stationnement, tirez simultanément les deux leviers de frein vers le haut.

S'ASSEOIR, SE LEVER ET MARCHER

Assurez-vous que les deux leviers de frein sont en position de stationnement avant de vous asseoir. Gardez les leviers de frein dans cette position jusqu'à ce que vous recommenciez à marcher.

Gardez vos pieds entre les roues arrière.

1. Poussez les deux leviers de frein vers le bas en position de stationnement.
2. Tout en vous appuyant sur les poignées, retournez-vous et asseyez-vous sur le siège.
3. Pour vous relever, appuyez-vous sur les poignées et retournez-vous.
4. Tirez les deux leviers de frein vers le haut et utilisez les freins de marche.
5. Relâchez les leviers de frein et pédalez -vers l'avant avec le déambulateur près de votre corps.

MAINTENANCE

Nettoyage

Utilisez un chiffon doux et humide et de l'eau tiède avec un savon doux pour nettoyer le déambulateur. Évitez de tremper. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs pour nettoyer.

Désinfection

Les désinfections ne peuvent être effectuées que par des personnes formées. Consultez votre revendeur spécialisé.

Inspection / Service / Réparations

La durée de vie du déambulateur est influencée par son utilisation, son stockage, son entretien, son entretien et son nettoyage.

Avant de reprendre l'utilisation du déambulateur, il doit être inspecté sur les points suivants :

- Montage ;
- Mécanisme de pliage : fonctionne bien ;


- Boulons et écrous : solidement fixés ;
- Freins : bon fonctionnement ;
- Roues (stabilité, suivi, vis de fixation). En cas de contact régulier avec des fils, des cheveux ou d'autres résidus, les roues peuvent se bloquer. Vérifiez régulièrement que les roues tournent librement et qu'elles sont en bon état.
- Cadre (déformation, stabilité, connexions) ;
- Poignées (verrouillage sûr du système de réglage de la hauteur, bon soutien des poignées) ;
- Siège (usure ou endommagement).

La fréquence de service dépend de la fréquence et de l'intensité de l'utilisation. Consultez votre revendeur spécialisé pour vous mettre d'accord sur la fréquence d'entretien.

Les réparations et les remplacements ne peuvent être effectués que par des personnes qualifiées, et seules des pièces de rechange d'origine de l'entreprise doivent être utilisées par votre revendeur spécialisé pour l'entretien et les réparations.

CARACTÉRISTIQUES

<i>Description</i>	<i>Dimensions</i>
Poids maximal de l'utilisateur	130 kg
Longueur totale	655 mm
Largeur plié	270 mm
Largeur totale	590 mm
Hauteur totale	740- 960 mm
Distance entre les poignées	490 mm
Hauteur de siège	620 mm
Largeur du siège	380 mm
Profondeur du siège	160 mm
Masse totale - avec le panier & plateau	9.4 kg
Diamètre des roues	190 mm
Frein	Frein de stationnement & fonctionnement
Poids Maximal du panier	5 kg
Température de stockage	+5°C - +41°C
Humidité de stockage	30% - 70%
Nous nous réservons le droit d'introduire des changements techniques. Tolérance de mesure +/- 15 mm <i>t</i> 1,5 kg <i>i</i> 1,5°.	

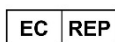

Obelis s.a.

Boulevard General Wahis 53 1030 Bruxelles, BELGIQUE