

ROLLATOR 4 ROUES ALU PLIANT

mon-materiel-
medical-en-
pharmacie.fr

VOTRE
PHARMACIEN
VOUS CONSEILLERA

Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Notice à conserver • En cas de perte, vous la retrouverez sur www.mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr • Référence produit : 37264

IMPORTANT

Lisez le manuel d'utilisation et les instructions d'installation avant le montage et l'utilisation du déambulateur. Respectez les avertissements de sécurité indiqués et assurez-vous que seules les personnes familiarisées avec ceux-ci peuvent utiliser le produit. Conservez le manuel pour une utilisation ultérieure et joignez-le si vous transférez le produit. Pour un usage en extérieur.

DÉSCRIPTION



1. Poignée
2. Barre de réglage
3. Frein
4. Bouton-poussoir pour régler les poignées
5. Siège
6. Roue arrière
7. Roue avant directrice
8. Sacoche de rangement
9. Dossier du siège
10. Porte canne

INDICATION

Ce produit est une aide à la marche pour l'extérieur et l'intérieur afin de compenser ou d'améliorer la capacité de marche limitée de l'utilisateur (élargissement du rayon d'activité ou de mobilité). Les personnes ayant des limitations des fonctions des mains et des bras ont besoin d'ajustements/conceptions particuliers des poignées ou des repose-mains/accoudoirs. Les aides à la marche mobiles peuvent ne pas convenir aux personnes souffrant de troubles de l'équilibre. Dans certains cas individuels, cela devrait être mis à l'épreuve, le cas échéant, un accompagnateur doit être présent car le déambulateur ne doit être utilisé que pour les activités normales et quotidiennes.

CONTRE-INDICATION

Le déambulateur n'est pas adapté à une utilisation en cas de troubles de la perception, de perte d'équilibre sévère, d'incapacité à s'asseoir.

INSTRUCTION DE SÉCURITÉ

N'utilisez le déambulateur que comme une aide à la marche !

N'utilisez le déambulateur que sur une surface plane et solide.

Le déambulateur ne peut pas être utilisé comme siège dans les véhicules, tels que les bus ou les trains !

Il est interdit de se tenir debout sur le déambulateur ou de transporter une personne ou un animal sur le déambulateur.

Prenez note du poids maximum autorisé de l'utilisateur. Ces informations se trouvent dans les caractéristiques techniques de ce mode d'emploi ainsi que sur la plaque signalétique.

N'utilisez le panier que pour transporter des objets et ne le surchargez pas ! Charge max. : 5,0 kg

L'utilisation sur les escaliers mécaniques et autres est expressément interdite !

N'accrochez aucun sac à la poignée, risque de basculement !

Sur les surfaces escarpées, utilisez le frein de service (tirez le levier de frein vers le haut).

Si vous vous appuyez excessivement sur les poignées, le déambulateur peut basculer vers l'arrière.

Lors du pliage/dépliage du déambulateur, les vêtements et les parties du corps peuvent être pincés.

Protégez le déambulateur de la lumière directe du soleil. Les pièces du produit peuvent devenir chaudes et causer des lésions cutanées si elles sont touchées.

Avant chaque utilisation, assurez-vous que votre déambulateur est intact et que toutes les pièces réglables sont correctement fixées. Vérifiez que les freins fonctionnent correctement !

Avant d'utiliser le déambulateur, assurez-vous que la protection rabattable est correctement verrouillée.

Vérifiez régulièrement les vis du déambulateur et serrez-les, si nécessaire.

Les freins peuvent être altérés par l'usure des pneus. Pour cette raison, vérifiez régulièrement les freins et les pneus.

Le déambulateur ne doit PAS être transporté par le siège, les pièces amovibles ou les câbles de frein.

Tout incident grave survenant en relation avec le produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouve l'utilisateur.

ASSEMBLAGE

- Le déambulateur est livré plié (fig. 1).
- Les poignées sont abaissées à leur position la plus basse.
- Placez le déambulateur sur une surface plane.
- Retirez la goupille de chaque côté (fig 3) puis défaites les bandes velcro (fig 2).

1




2



- Abaissez les roues arrière et faites pivoter les roulettes pour déplier le châssis.
- Fixez en replaçant les 2 goupilles de chaque côté (fig3)
- Positionner le déambulateur au sol sur ses roues.

3

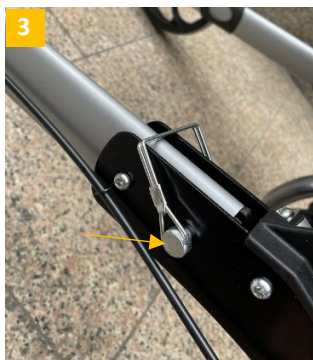

- Écartez les deux demi-sections en même temps et poussez latéralement sur l'entretoise transversale afin d'enclencher le crochet de verrouillage situé sous le siège à gauche jusqu'à ce que le mécanisme soit complètement verrouillé (fig. 4).
- Vérifier l'état général, vérifier que tous les éléments mécaniques sont présents, sécurisés, serrés et verrouillés en place.
- Vérifiez que la sangle de soutien dorsal est correctement fixée en place (fig. 5).



ATTENTION

- Assurez-vous que les 4 boutons sont bien serrés et que les 2 boutons-poussoirs sont correctement enclenchés.
- Gardez les doigts et les objets à l'écart des zones de pliage du déambulateur.
- Vérifiez que le sac de transport est bien fixé à l'avant du déambulateur.
- Pour plier le déambulateur, il suffit de tirer sur la poignée pliante située au centre du siège.

DÉPLIAGE

- Placez le déambulateur sur ses roues.
- Appuyez sur les deux rails latéraux de la section du siège vers le bas jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

MONTAGE DE LA SACOCHE

- La sacoche est suspendue par ses boucles aux extrémités du tube du cadre.

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DES BARRES DE POIGNÉES

- Effectuez le réglage en hauteur des poignées en appuyant sur le bouton-poussoir puis en recouvrant le tube.
- Relâchez une fois à la position requise (à la même hauteur de chaque côté) en vous assurant qu'il est correctement verrouillé en place.

PORTE-CANNE

- Placez le porte-canne avec les goupilles dans les 2 trous des tuyaux de la poignée de poussée sous le dossier et fermez le clip.

- La partie inférieure de la canne doit être fixée avec la goupille dans l'ensemble de la fixation. Assurez-vous que l'assemblage est correct. Le porte-canne peut être monté à gauche ou à droite.

AJUSTEMENT DES FREINS


- Si le freinage est faible ou trop fort, le frein peut être réglé soit au niveau du carter de frein situé au-dessus, soit à l'aide de la vis de réglage du câble Bowden ci-dessous (fig. 6) pour obtenir le freinage souhaité.
- Le frein est correctement réglé lorsque le levier de frein ainsi que le câble de frein ont un peu de jeu et que les roues peuvent être tournées sans bruit de grincement lorsque le frein est relâché.



FREINAGE/STATIONNEMENT

Pour freiner lorsque vous marchez avec le déambulateur, tirez les deux poignées de frein vers le haut avec vos mains (fig. 7). Freinez toujours lentement tout en appliquant une pression égale avec les deux mains.

Pour freiner/garer le déambulateur, appuyez sur les deux poignées de frein vers le bas jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent de manière audible (fig. 8). Pour relâcher le frein, tirez à nouveau les deux poignées de frein vers le haut jusqu'à ce qu'elles soient relâchées (les poignées de frein sont en position médiane).

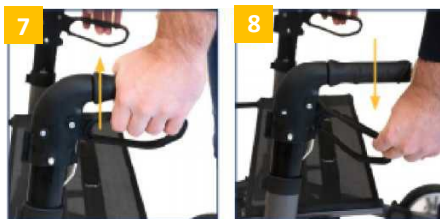

Le freinage peut être altéré par l'usure des pneus. Pour cette raison, vérifiez régulièrement le freinage.

ASSIS

Placez le déambulateur sur une surface plane et solide. Ensuite, appuyez sur les freins. Le déambulateur doit être stable et ne doit pas glisser. Asseyez-vous bien droit ; Ne vous penchez pas en arrière (**fig. 9**).

La position assise n'est autorisée que telle qu'illustrée et dans le sens inverse du mouvement (**fig. 9**). La position assise est interdite dans le sens du mouvement (**fig.10**)

9



10



PLIAGE/TRANSPORT/ARRIMAGE

Pour replier le déambulateur, utilisez la poignée pour tirer la section du siège vers le haut.

NETTOYAGE/MAINTENANCE

- Nettoyez régulièrement avec un chiffon humide !
 - N'utilisez pas d'agents de décaillage agressifs !
 - N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs !
 - N'utilisez pas de produits à base de chlore et de vinaigre à forte dose !
- Pour désinfecter, il est possible d'utiliser un spray désinfectant
- Vérifiez régulièrement les vis et serrez-les, si nécessaire.
- Le produit ne doit pas être exposé à des températures supérieures à 60°C pendant de longues périodes (par exemple, utilisation dans un sauna, etc.) !
- En cas de défauts, contactez votre revendeur spécialiste auprès duquel vous avez acheté ce produit !
- Vérifiez régulièrement l'état des pneus. Ils sont « à sécurité intégrée », ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de vérifier la pression de l'air. Cependant, vérifiez toujours que les pneus ne sont pas déchirés ou endommagés.

CARACTÉRISTIQUES

PRODUIT	DIMENSION
Dimensions hors-tout (Longueur x largeur x Hauteur)	66,5 x 69 x 79/92 cm
Dimension de l'assise (largeur x Profondeur x Hauteur)	45 x 22 x 54,5 cm
Largeur pliée	32 cm
Distance entre les poignées	46,5 cm
Poids net total	7.5 kg
Poids utilisateur maxi	136 kg
Poids maxi sacoche	5 kg
Matériau	Aluminium

EC REP

Obelis s.a.

Boulevard General Wahis 53 1030 Bruxelles, BELGIQUE

Manuel d'u

Importé et distribué par : Amadis - 85110 Chantonay – France
Mars 2025

l-en-pharmacie.fr

