

ROLLATOR 4 ROUES BLACKLIGHT

mon-materiel-
medical-en-
pharmacie.fr

VOTRE
PHARMACIEN
VOUS CONSEILLERA

Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Notice à conserver • En cas de perte, vous la retrouverez sur www.mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr • Référence produit : 45986

IMPORTANT

Lisez le manuel d'utilisation et les instructions d'installation avant le montage et l'utilisation du déambulateur/rollator. Respectez les avertissements de sécurité indiqués et assurez-vous que seules les personnes familiarisées avec ceux-ci peuvent utiliser le produit. Conservez le manuel pour une utilisation ultérieure et joignez-le si vous transférez le produit. Pour un usage en extérieur.

DÉSCRIPTION



1. Poignée avec frein
2. Dossier pour le siège
3. Ajusteur de hauteur/ Bouton de serrage
4. Siège
5. Sacoche de rangement
6. Roue arrière
7. Roue avant directrice

ASSEMBLAGE

1. Retirez tous les emballages de protection et dépliez le déambulateur. Placez-le à la verticale avec les roues sur le sol ou sur une surface plane.
2. Assurez-vous que le bouton de serrage et la goupille sont retirés du cadre (ils peuvent ou non arriver de cette façon) (fig. A)
3. Insérez le tube de la poignée dans le cadre du déambulateur en vous assurant que le câble se trouve à l'extérieur du cadre du déambulateur.
4. Sélectionnez la hauteur requise et insérez la goupille à travers le cadre et la poignée, en vous assurant que la tête hexagonale de la goupille se trouve à l'extérieur (fig. B et C)
5. Fixez le bouton de serrage de l'autre côté de la goupille et serrez, (fig. D)



6. Répétez l'opération pour l'autre poignée.
7. Pour ajuster la hauteur des poignées, inversez le processus ci-dessus.

INSTRUCTION DE SÉCURITÉ

- Assurez-vous d'adopter une posture confortable et de pouvoir actionner les freins avec facilité.
- Assurez-vous que les poignées sont à des hauteurs égales et bien verrouillées en position.
- Assurez-vous que le déambulateur est complètement déplié avant utilisation.
- Assurez-vous que les freins sont testés avant utilisation.
- Ne pas utiliser sur des pentes supérieures à 7 degrés.
- Assurez-vous que les freins sont verrouillés lorsque vous utilisez le siège.
- Lorsque vous êtes assis, assurez-vous que l'utilisateur est assis au centre du siège.

FREINAGE



1. Pour actionner les freins, appuyez sur le levier vers le haut pour engager le frein.
2. Pour verrouiller les freins, appuyez sur le levier de frein jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
3. Pour déverrouiller les freins, tirez sur le levier de frein jusqu'à ce que le verrou soit retiré.

PLIAGE

Pour plier le déambulateur, soulevez le siège et tirez sur le cordon noir tout en tenant les poignées du déambulateur et en soulevant le déambulateur en même temps. Cela pliera le déambulateur pour un rangement et un transport facile.

MAINTENANCE

- Assurez-vous que le déambulateur est maintenu propre. Essayez régulièrement le déambulateur avec un chiffon humide.
- Vérifiez régulièrement les roues et les poignées réglables en hauteur.
- Assurez-vous que les freins ont été réglés en fonction des roues et de l'utilisateur.
- Assurez-vous que tous les écrous, boulons et vis sont bien serrés à intervalles réguliers.
- Si la roue arrière est cassée ou très usée, remplacez-la immédiatement.
- Vérifiez que la roue directrice pivote librement.

CARACTÉRISTIQUES

PRODUIT	DIMENSION
Longueur totale	60 cm
Largeur totale	60 cm
Hauteur totale	79,5/90 cm
Largeur plié	20 cm
Largeur de l'assise	35 cm
Profondeur de l'assise	32 cm
Hauteur assise	52,5 cm
Poids du rollator	5.7 kg
Poids utilisateur maxi	110 kg



Obelis s.a.

Boulevard General Wahis 53 1030 Bruxelles, BELGIQUE