

ENFILE BAS MÉTAL

mon-materiel-
medical-en-
pharmacie.fr

VOTRE
PHARMACIEN
VOUS CONSEILLERA

Manuel d'utilisation





Merci de lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Notice à conserver • En cas de perte, vous la retrouverez sur www.mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr •

Référence produit : 47407

L'enfile-bas en métal est un accessoire indispensable pour les personnes rencontrant des difficultés à se baisser ou à enfiler leurs bas et/ou chaussettes. Grâce à sa structure robuste et ergonomique, il permet une mise en place rapide et sans effort, améliorant ainsi l'autonomie au quotidien.

Conditions d'utilisation :

1. **Préparation** : Placez le bas sur le cadre de l'enfile bas, en veillant à bien positionner le talon et à ce que le bas soit bien étiré et maintenu en place.
2. **Insertion du pied** : Asseyez-vous avec le pied à plat et glissez délicatement votre pied dans l'ouverture du bas. Aidez-vous des poignées pour guider l'enfile-bas si nécessaire.
3. **Mise en place** : Tirez progressivement l'enfile-bas vers le haut afin que le bas épouse correctement votre pied et votre cheville. Continuez jusqu'à ce qu'il soit entièrement enfilé et que l'enfile-bas puisse être retiré facilement.
4. **Ajustement final** : Vérifiez et ajustez le bas si besoin pour un confort optimal et un bon maintien.

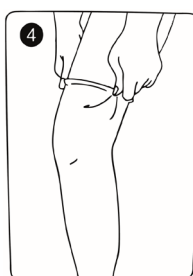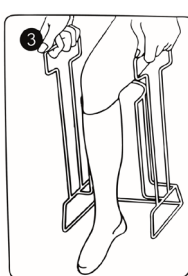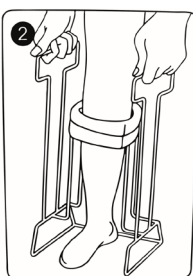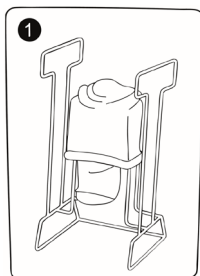

Dimensions (LxlaxH) : 21.5 x 18 x 36.2 cm

Poids de l'enfile bas : 750 g

Garantie 2 ans

