

BROYEUR ET COUPE COMPRIMÉ 3 EN 1

mon-materiel-
medical-en-
pharmacie.fr

VOTRE
PHARMACIEN
VOUS CONSEILLE

Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Notice à conserver • En cas de perte, vous la retrouverez sur www.mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr • Référence produit : 47473

Le broyeur et coupe comprimé 3 en 1 ergonomique a été conçu pour organiser et faciliter la prise de médicaments.

Utilisation

Le broyeur et coupe comprimé permet 3 principales fonctions :

1. Ranger et stocker les médicaments ou vitamines dans un compartiment dédié. Pratique lors des déplacements ou voyages.
2. Une fonction pour couper les gros comprimés et faciliter la prise du médicament.
3. Une fonction pour émietter le comprimé et faciliter sa prise.

Le broyeur et coupe comprimé se lave et se rince facilement à l'eau.



Attention : le broyeur et coupe comprimé n'est pas un dispositif médical. C'est un accessoire pour organiser et faciliter la prise de médicaments.

Conditions d'utilisation et sécurité

Utiliser le broyeur et coupe comprimé pour l'usage prévu.

Ne pas modifier la structure du produit et ne pas le réparer vous-même.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise utilisation ou entretien.

Tenir hors de portée des enfants.

Dimension (LxlaxH) : 4.4 x 4.2 x 6.6 cm

Garantie 2 ans

