

TABOURET DE DOUCHE ROND GABIN

Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Notice à conserver •
En cas de perte, vous la retrouverez sur www.mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr •
Référence produit : 48790




INDICATION :

Le tabouret Gabin est indiqué pour les personnes présentant une incapacité ou une difficulté à rester debout, de façon stable dans la douche, en raison d'une lésion fonctionnelle au niveau des membres inférieurs (mobilité réduite, fatigabilité ou douleurs) et/ou de troubles de l'équilibre ou d'un risque de chute. L'utilisation de ce dispositif suppose : une stabilité posturale du tronc suffisante pour maintenir la position assise sans soutien dorsal ou latéral, des capacités fonctionnelles des membres supérieurs préservées pour assurer les gestes de toilette et la sécurité lors des transferts. Il est particulièrement adapté aux espaces de douche réduits.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET RECOMMANDATIONS :


- Le tabouret ne doit pas être utilisé pour supporter des personnes de plus de 136 kg
- Le sol doit être plat et stable (ne pas mettre le tabouret sur un tapis antidérapant).
- Vérifier, avant chaque utilisation, que tous les composants sont solidement fixés et que les 4 pieds touchent le sol simultanément à tout moment.
- En cas d'utilisation dans une baignoire, s'assurer que les embouts en caoutchouc ne touchent pas les parois de la baignoire.
- S'assurer que les 4 pieds sont réglés au même niveau (repères numérotés de 1 à 8 sur chaque pied) et que les boutons poussoirs sont correctement et complètement enclenchés.
- L'utilisateur ne doit pas présenter de trouble de l'équilibre et doit pouvoir se tenir seul en position assise.
- Ne jamais laisser l'utilisateur sans surveillance (veiller à sa stabilité lors de l'utilisation).
- Ne jamais déplacer le tabouret si une personne est assise dessus.
- Ne pas se mettre debout sur le siège.
- Ne pas se tenir en équilibre sur deux sur les pieds du tabouret.

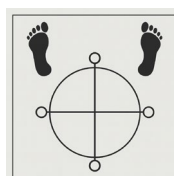

Attention : L'utilisateur doit impérativement s'asseoir en respectant le sens de positionnement du tabouret. Il doit placer ses pieds de part et d'autre de l'un des pieds du tabouret de telle sorte que les 4 pieds du tabouret forment un signe « + » au sol (voir illustration ci-contre).

MONTAGE :

- Retirez le contenu de la boîte
- Disposez le siège sur une surface plane de façon à avoir accès aux trous
- Alignez le cintre A (le cintre à partie concave en dessous) avec les trous du siège. Insérez les deux vis et les rondelles dans les trous extérieurs et serrez. Ne posez pas la vis du centre.
- Alignez le cintre B (le cintre à partie concave sur le dessus) avec les trous du siège. Insérez les vis et les rondelles dans les deux trous extérieurs et serrez.
- Insérer la vis et la rondelle au centre au travers des deux cintres et serrez.

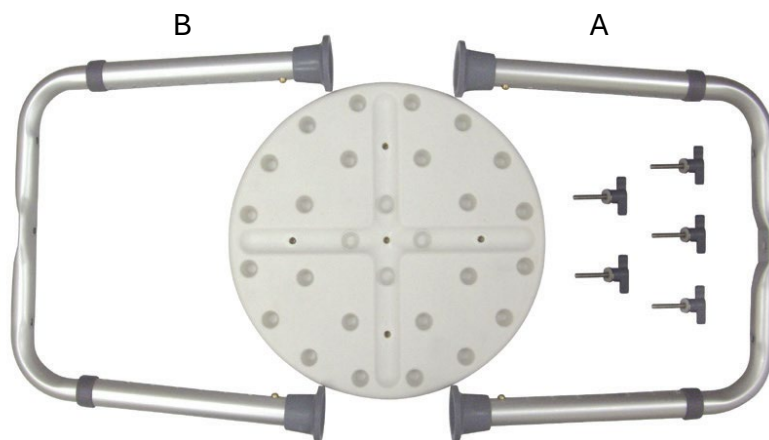

ATTENTION : Toutes les vis doivent être correctement serrées et le serrage régulièrement contrôlé. De même, bien s'assurer que les 4 boutons poussoirs des pieds soient correctement et complètement enclenchés, et qu'ils sont tous positionnés au même niveau (repères numérotés de 1 à 8 sur chaque pied).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Dimensions hors-tout (l x p x h)	Mini : 340 x 455 x 350 mm Maxi : 370 x 480 x 535 mm
Hauteur sol/siège (au centre)	Mini : 350 mm / Maxi : 535 mm (8 positions)
Dimensions du siège	315 mm
Matière	structure : aluminium - siège : plastique
Couleur	Blanc
Poids	1,5 kg
Poids maximum supporté	136 kg



Dimensions
en (mm)



ENTRETIEN RÉGULIER

- Essuyer le tabouret après chaque utilisation pour enlever tout excès d'eau. Le stocker dans un local sec et aéré.
- Le laver régulièrement avec un chiffon doux (utiliser de l'eau tiède et un détergent doux).
- Ne jamais utiliser de produits abrasifs ou à base de javel qui risqueraient d'endommager ou de décolorer le tabouret.
- Vérifier régulièrement l'état des 4 embouts antidérapants. En cas de détérioration ou d'usure, les remplacer immédiatement.
- Vérifier régulièrement l'état des éléments de serrage et que les tubes ne sont ni tordus, rouillés ou endommagés.

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie légale de conformité du tabouret est de 2 ans. Cette garantie correspond à un emploi normal du tabouret et exclut tous dommages dus à une mauvaise utilisation, à un manque d'entretien ou à un non-respect des recommandations émises. La garantie ne s'applique pas si le produit a été modifié ou réparé sans l'accord du fabricant.

La garantie ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces. Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêt directs ou indirects. Tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.



Importé et distribué par : Amadis – 85110 Chantonay – France



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Sunshine Healthcare Co., Ltd
Flat/Rm 02 7/F Spa Centre No. 53-55 Lockhart Road Wan Chai Hk

