

CHAISE DE DOUCHE À DÉCOUPE ANATOMIQUE MERLIN

mon-materiel-
medical-en-
pharmacie.fr

VOTRE
PHARMACIEN
VOUS CONSEILLE

Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Notice à conserver •
En cas de perte, vous la retrouverez sur www.mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr •
Référence produit : 48791



INDICATION

La chaise Merlin est indiquée pour les personnes souffrant d'une incapacité à se tenir debout, en position stable, dans la douche, en raison d'une lésion fonctionnelle au niveau des membres inférieurs avec mobilité et tonus musculaire réduits ou nuls et/ou troubles de l'équilibre ou tendance à la chute d'autre origine. La stabilité posturale du tronc étant suffisante pour rester assis et les capacités fonctionnelles des membres supérieurs étant demeurées suffisantes.


INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET RECOMMANDATIONS :

- La chaise ne doit pas être utilisée pour supporter des personnes de plus de 136 kg.
- Le sol doit être plat et stable (ne pas mettre la chaise sur un tapis antidérapant).
- Vérifier, avant chaque utilisation, que tous les composants de la chaise sont solidement fixés et que les 4 pieds touchent le sol.
- Vérifier que la chaise est bien positionnée sur ses pieds et qu'elle est parfaitement stable.
- S'assurer que les 4 pieds sont réglés au même niveau et que les boutons poussoirs sont correctement et complètement enclenchés.
- En cas d'utilisation dans une baignoire, s'assurer que les embouts en caoutchouc ne touchent pas les parois de la baignoire.
- L'utilisateur ne doit pas présenter de trouble de l'équilibre et doit pouvoir se tenir assis seul.
- Ne jamais laisser l'utilisateur sans surveillance (veiller à sa stabilité lors de l'utilisation).
- Ne jamais s'asseoir sur les côtés.
- Ne pas se mettre debout sur le siège.
- Ne pas se tenir en équilibre sur les deux pieds arrière de la chaise.
- Ne jamais déplacer la chaise lorsqu'une personne est assise dessus.

MONTAGE :

Liste des composants :

- Siège : x1
- Dossier : x1
- Rondelles incurvées : x9
- Tubes coudés (dossier) : x2
- Tubes cintrés (structure) : x2
- Pieds : x4
- Vis courtes (S) : x5
- Vis longues (L) : x4

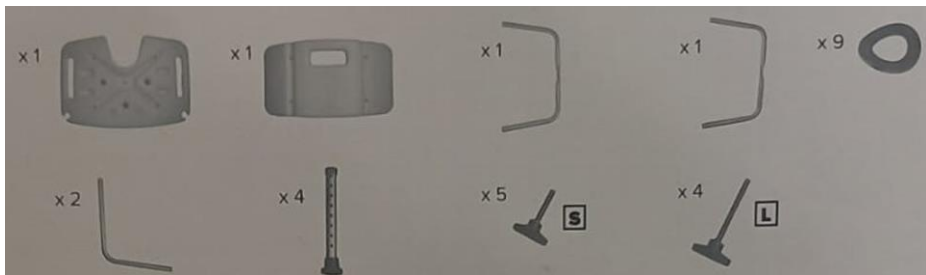

ÉTAPE 1

Positionner les 2 cintres de la structure sous le siège en respectant le sens (parties aplaties placées l'une sur l'autre et alignées : cintre numéroté « 1 » à placer sur le cintre numéroté « 2 » et cintre numéroté « 2 » à placer sous le siège). Placer la vis centrale courte (S) + 1 rondelle incurvée au milieu des 2 cintres pour les fixer au siège.



ÉTAPE 2

Emboîter les 4 pieds en veillant à ce que les boutons poussoirs soient parfaitement et complètement enclenchés dans les trous. S'assurer que les 4 embouts antidérapants sont suffisamment enfoncés.



ÉTAPE 3

Fixer au niveau de l'assise les 2 tubes coudés du dossier à l'aide des 4 vis longues (L) + 4 rondelles incurvées. Ne pas bloquer ces vis afin de laisser du jeu pour le montage du dossier.
Remarque : la profondeur de l'assise peut être réglée en choisissant l'un des deux trous sur les supports de l'armature.



ÉTAPE 4

Fixer le dossier (poignée vers le haut) en utilisant les 4 vis courtes (S) + 4 rondelles incurvées.



ÉTAPE 5


Serrer toutes les vis installées (S et L) puis retourner la chaise sur ses pieds et procéder au réglage des pieds à la hauteur souhaitée. Les 4 pieds doivent obligatoirement tous être positionnés au même niveau.

Attention :

Toutes les vis doivent être correctement serrées et le serrage régulièrement contrôlé. Avant toute utilisation, bien s'assurer que les 4 boutons poussoirs des pieds soient correctement et complètement enclenchés.

CARACTÉRISTIQUES :

Dimensions hors-tout (l x p x h)	Mini : 465 x 415 x 740 mm Maxi 485 x 435 x 860 mm
Hauteur sol/siège (au centre)	Mini : 380 mm / Maxi : 510 mm (6 positions)
Dimensions du siège (l x p)	475 x 325 mm
Dimensions du dossier (l x p x h)	420 x 25 x 175 mm
Matière	structure : aluminium - siège : plastique
Couleur	Blanc
Poids	2,6 kg
Poids maximum supporté	136 kg

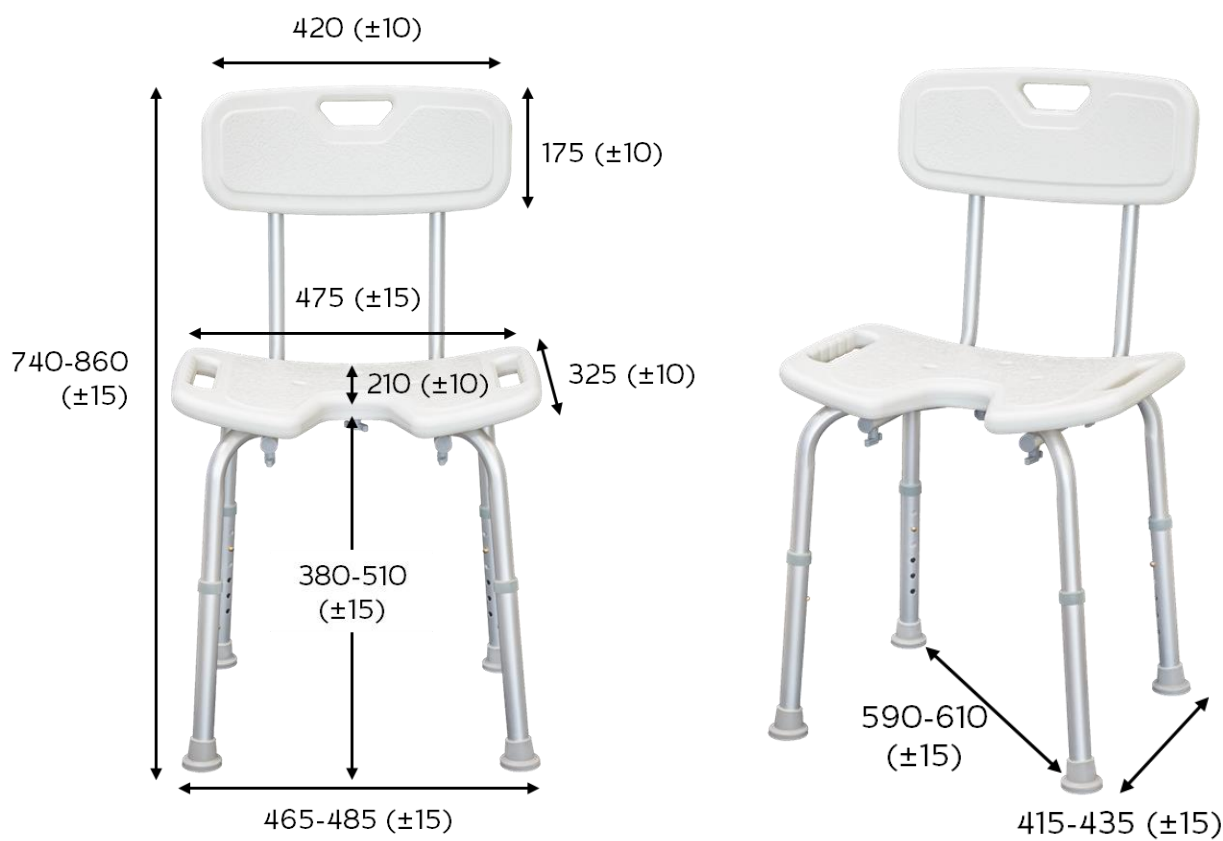

Dimensions
en (mm)

ENTRETIEN RÉGULIER :

- Essuyer la chaise après chaque utilisation pour enlever l'excès d'eau. La stocker dans un local sec et aéré.
- Nettoyer régulièrement la chaise à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse tiède suivi d'un séchage (ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou à base de Javel qui risqueraient d'endommager ou de décolorer la chaise).
- Vérifier régulièrement l'état des 4 patins antidérapants et les remplacer dès qu'ils sont dégradés.
- Vérifier régulièrement l'état des éléments de serrage et que les tubes du châssis ne sont ni tordus, rouillés ou endommagés.

CONDITIONS DE GARANTIE :

La garantie légale de conformité de la chaise est de 2 ans. Cette garantie correspond à un emploi normal de la chaise et exclut tous dommages dus à une mauvaise utilisation, à un manque d'entretien ou à un non-respect des recommandations émises. La garantie ne s'applique pas si le produit a été modifié ou réparé sans l'accord du fabricant.

La garantie ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces. Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêt directs ou indirects. Tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.



Importé et distribué par : Amadis – 85110 Chantonay – France



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Sunshine Healthcare Co., Ltd
Flat/Rm 02 7/F Spa Centre No. 53-55 Lockhart Road Wan Chai Hk

