

TABOURET DE DOUCHE RECTANGLE COLIN

mon-materiel-
medical-en-
pharmacie.fr

VOTRE
PHARMACIEN
VOUS CONSEILLE

Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Notice à conserver •
En cas de perte, vous la retrouverez sur www.mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr •
Référence produit : 48792



INDICATION :

Le tabouret Colin est indiqué pour les personnes présentant une incapacité ou une difficulté à rester debout, de façon stable dans la douche, en raison d'une lésion fonctionnelle au niveau des membres inférieurs (mobilité réduite, fatigabilité ou douleurs) et/ou de troubles de l'équilibre ou d'un risque de chute. L'utilisation de ce dispositif suppose : une stabilité posturale du tronc suffisante pour maintenir la position assise sans soutien dorsal ou latéral, des capacités fonctionnelles des membres supérieurs préservées pour assurer les gestes de toilette et la sécurité lors des transferts.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET RECOMMANDATIONS :

- Le tabouret ne doit pas être utilisé pour supporter des personnes de plus de 136 kg.
- Le sol doit être plat et stable (ne pas mettre le tabouret sur un tapis antidérapant)
- Vérifier avant toute utilisation que tous les composants sont solidement fixés et que les 4 pieds touchent le sol.
- Vérifier que le tabouret est bien positionné sur ses pieds et qu'il est parfaitement stable.
- Si le tabouret est utilisé dans une baignoire, s'assurer que les pieds ne touchent pas les parois de la baignoire.
- L'utilisateur ne doit pas présenter de trouble de l'équilibre et doit pouvoir se tenir seul en position assise.
- Ne jamais laisser l'utilisateur sans surveillance (veiller à sa stabilité lors de l'utilisation).
- Ne pas se pencher en arrière ou sur les côtés
- Ne jamais déplacer le tabouret si le patient est assis dessus.
- Ne pas se mettre debout sur le siège
- Ne pas se tenir en équilibre sur les deux pieds arrière du tabouret.

MONTAGE

- Positionner les 2 cintres de la structure sous le siège en respectant le sens (parties aplaties placées l'une sur l'autre : cintre numéroté « 1 » à placer sur le cintre numéroté « 2 » et cintre numéroté « 2 » à placer sous le siège). Placer une vis + une rondelle au centre des 2 cintres pour les fixer au siège puis terminer l'assemblage en vissant les 4 autres vis + rondelles.




Attention : contrôler que les 5 vis sont correctement serrées avant d'utiliser le tabouret.

- Emboîter les 4 pieds en veillant à ce que les **boutons poussoirs soient parfaitement et complètement enclenchés dans les trous et régler à la même hauteur**. S'assurer que les 4 embouts antidérapants soient suffisamment enfoncés.




- Positionner le tabouret de douche contre le rebord intérieur de la douche.

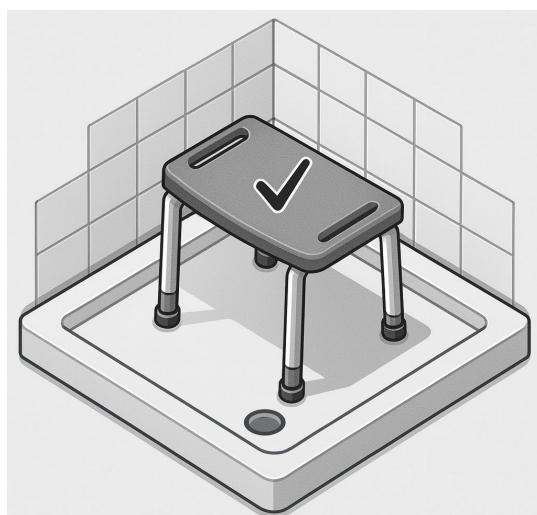

CARACTÉRISTIQUES :

Dimensions hors-tout (l x p x h)	Mini : 460 x 395 x 380 mm Maxi : 480 x 415 x 510 mm
Hauteur sol/siège (au centre)	Mini : 380 mm / Maxi : 510 mm (6 positions)
Dimensions du siège (l x p)	510 x 310 mm
Matière	structure : aluminium - siège : plastique
Couleur	Blanc
Poids	1,9 kg
Poids maximum supporté	136 kg

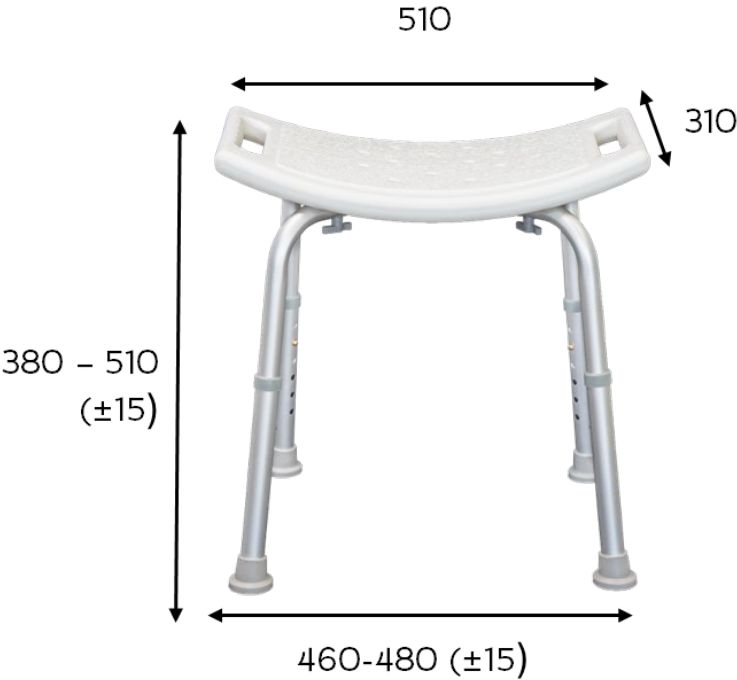

Dimensions
en (mm)

ENTRETIEN RÉGULIER

- Essuyer le tabouret après chaque utilisation pour enlever tout excès d'eau. Le stocker dans un local sec et aéré.
- Le laver régulièrement avec un chiffon doux (utiliser de l'eau tiède et un détergent doux).
- Ne jamais utiliser de produits abrasifs ou à base de javel qui risqueraient d'endommager ou de décolorer le tabouret.
- Vérifier régulièrement l'état des 4 embouts antidérapants. En cas de détérioration ou d'usure, les remplacer immédiatement.
- Vérifier régulièrement l'état des éléments de serrage et que les tubes ne sont ni tordus, rouillés ou endommagés.

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie légale de conformité du tabouret est de 2 ans. Cette garantie correspond à un emploi normal du tabouret et exclut tous dommages dus à une mauvaise utilisation, à un manque d'entretien ou à un non-respect des recommandations émises. La garantie ne s'applique pas si le produit a été modifié ou réparé sans l'accord du fabricant.

La garantie ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces. Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêt directs ou indirects. Tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.



Importé et distribué par : Amadis – 85110 Chantonay – France



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Sunshine Healthcare Co., Ltd

Flat/Rm 02 7/F Spa Centre No. 53-55 Lockhart Road Wan Chai Hk

