

TABOURET DE DOUCHE ROTATIF ROBIN

mon-materiel-
medical-en-
pharmacie.fr

VOTRE
PHARMACIEN
VOUS CONSEILLE

Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Notice à conserver •
En cas de perte, vous la retrouverez sur www.mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr •
Référence produit : 48793



INDICATION :

Le tabouret Robin est indiqué pour les personnes présentant une incapacité ou une difficulté à rester debout, de façon stable dans la douche, en raison d'une lésion fonctionnelle au niveau des membres inférieurs (mobilité réduite, fatigabilité ou douleurs) et/ou de troubles de l'équilibre ou d'un risque de chute. L'utilisation de ce dispositif suppose : une stabilité posturale du tronc suffisante pour maintenir la position assise sans soutien dorsal ou latéral, des capacités fonctionnelles des membres supérieurs préservées pour assurer les gestes de toilette et la sécurité lors des transferts. Il est particulièrement adapté aux espaces de douche réduits. De plus, l'assise tournante de ce tabouret permet à l'utilisateur de pivoter facilement sur 360°.

MONTAGE :

- Retirez le contenu de la boîte.
- Préparez une patte en plaçant un embout bleu en caoutchouc sur l'extrémité de la patte ajustable dépourvue d'un bouton poussoir en laiton. Répétez l'opération pour les trois autres pattes.
- Insérez la patte ajustable dans le réceptacle un peu plus grand en enfonceant le bouton poussoir en laiton. Répétez l'opération pour les trois autres pattes.
- Placez le siège à l'envers sur une surface plane. Enfoncez le bouton poussoir en laiton et insérez chaque patte dans le cadre du siège. Vous entendrez un déclic lorsque la patte est bien insérée. Répétez l'opération pour les trois autres pattes.
- Remettez le siège à l'endroit. Placez le plateau de rangement entre les pattes et insérer les renforts transversaux dans les réceptacles des colliers bleu des pattes.
- Poids maximum supporté 136 Kg

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET RECOMMANDATIONS :

- Le tabouret ne doit pas être utilisé pour supporter des personnes de plus de 136 kg
- Le sol doit être plat et stable (ne pas mettre le tabouret sur un tapis antidérapant).
- Avant d'utiliser le siège, ajustez la hauteur de chaque patte selon vos besoins et assurez-vous que toutes les pattes ont la même hauteur. Lorsque l'ajustement est adéquat, verrouillez chaque patte en vous assurant que les boutons dépassent bien dans les trous.
- Poussez et tirez sur chaque patte pour vous assurer qu'elles sont bien verrouillées.
- Vérifier, avant chaque utilisation, que tous les composants sont solidement fixés et que les 4 pieds touchent le sol simultanément à tout moment.
- En cas d'utilisation dans une baignoire, s'assurer que les embouts en caoutchouc ne touchent pas les parois de la baignoire.
- L'utilisateur ne doit pas présenter de trouble de l'équilibre et doit pouvoir se tenir seul en position assise.
- Ne jamais laisser l'utilisateur sans surveillance (veiller à sa stabilité lors de l'utilisation).
- Ne jamais déplacer le tabouret si une personne est assise dessus.
- Ne pas se mettre debout sur le siège.
- Ne pas se tenir en équilibre sur deux sur les pieds du tabouret.

SIÈGE PIVOTANT :


- Pousser avec vos pieds à droite ou à gauche pour faire pivoter le siège.

ENTRETIEN RÉGULIER :

- Essuyer le tabouret après chaque utilisation pour enlever tout excès d'eau. Le stocker dans un local sec et aéré.
- Le laver régulièrement avec un chiffon doux (utiliser de l'eau tiède et un détergent doux).
- Ne jamais utiliser de produits abrasifs ou à base de javel qui risqueraient d'endommager ou de décolorer le tabouret.
- Vérifier régulièrement l'état des 4 embouts antidérapants. En cas de détérioration ou d'usure, les remplacer immédiatement.
- Vérifier régulièrement l'état des éléments de serrage et que les tubes ne sont ni tordus, rouillés ou endommagés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions hors-tout (l x p x h)	Mini : 320 x 430 x 415 mm Maxi : 335 x 450 x 515 mm
Hauteur sol/siège (au centre)	Mini : 415 mm / Maxi : 515 mm (5 positions)
Dimensions du siège	355 mm
Matière	structure : aluminium - siège : plastique
Couleur	Bleu
Poids	2,4 kg
Poids maximum supporté	136 kg

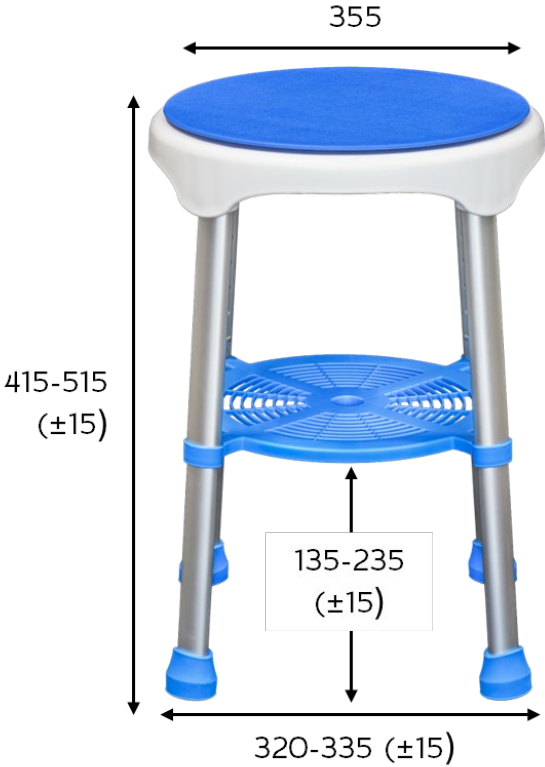

Dimensions
en (mm)

CONDITIONS DE GARANTIE :

La garantie légale de conformité du tabouret est de 2 ans. Cette garantie correspond à un emploi normal du tabouret et exclut tous dommages dus à une mauvaise utilisation, à un manque d'entretien ou à un non-respect des recommandations émises. La garantie ne s'applique pas si le produit a été modifié ou réparé sans l'accord du fabricant.

La garantie ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces. Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêt directs ou indirects. Tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.



Importé et distribué par : Amadis – 85110 Chantonay – France



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Sunshine Healthcare Co., Ltd
Flat/Rm 02 7/F Spa Centre No. 53-55 Lockhart Road Wan Chai Hk

