

Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Notice à conserver •
En cas de perte, vous la retrouverez sur www.mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr •
Référence produit : 49012

INTRODUCTION

Ces instructions fournissent aux utilisateurs et/ou aux aidants des informations sur l'utilisation sûre et efficace de ce produit, y compris le nettoyage, l'entretien et le fonctionnement. Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser ce produit. Ce produit peut être utilisé comme une aide à la marche. Il est équipé d'un siège, d'un dossier et d'un sac de rangement. Les modifications non autorisées et/ou l'installation de composants et d'accessoires tiers non approuvés ne sont pas autorisées. Ce rollator est adapté à une utilisation en intérieur et en extérieur.

DÉSCRIPTION DES PIÈCES



LES COMPOSANTS

Retirez tous les éléments de l'emballage avant de placer les composants sur une surface plane. Contactez votre revendeur si des pièces manquent dans la boîte du produit.



MONTAGE

Insérez l'ensemble « roue avant » dans la base du cadre avant. Fixez-le à l'aide des 2 clips en forme de « C ».



Insérez l'ensemble « roue arrière » dans la base du cadre arrière. Fixez l'ensemble à la hauteur souhaitée en appuyant sur les boutons poussoir. Répétez l'opération de l'autre côté.



Placez le rollator à la verticale sur ses roues. Insérez la poignée dans la partie supérieure du cadre. Fixez la poignée à la hauteur souhaitée à l'aide du bouton en forme d'étoile. Répétez l'opération de l'autre côté.



Placez le câble de frein dans le clip en forme de « S » pour le fixer au cadre. Répétez l'opération de l'autre côté.



Fixez le dossier au cadre en appuyant et en positionnant les boutons poussoir dans le support. Assurez-vous que le dossier est bien fixé avant d'utiliser le rollator comme siège.



DÉMONTAGE

Suivez les instructions de montage dans l'ordre inverse pour démonter le rollator.

AJUSTER VOTRE ROLLATOR

Réglage des poignées :

Desserrez la molette en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirez la molette du support de poignée. Relevez ou abaissez la poignée à la hauteur souhaitée. Réinsérez la molette dans le support de poignée. Serrez la molette en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Répétez l'opération de l'autre côté.



Pour régler la bonne hauteur des poignées, tenez-vous debout derrière le rollator, les bras le long du corps. Réglez la hauteur des poignées de manière à ce qu'elles soient au niveau des poignets de l'utilisateur.

Assurez-vous que les deux poignées sont à la même hauteur avant d'utiliser le rollator.

UTILISER LES FREINS

Freinage

Serrez progressivement les deux leviers de frein pour arrêter le rollator. Relâchez les leviers de frein pour repartir.



Verrouillage

Poussez les deux leviers de frein vers le bas pour verrouiller les freins. Un « clic » audible confirmera que les freins sont bien enclenchés.



Ne jamais : pousser le rollator lorsque quelqu'un est assis sur le siège et ne desserrez jamais les freins de stationnement lorsque le siège est utilisé

Déverrouillage

Tirez les deux leviers de frein vers le haut pour déverrouiller les freins



PLIER LE ROLLATOR

Appuyez sur les deux leviers de frein vers le bas pour verrouiller les freins. Soulevez le dossier vers le haut pour le rabattre. Soulevez le siège vers le haut pour faire apparaître la barre de soutien . Tirez la barre de soutien vers le haut pour plier le rollator.



DÉPLIER LE ROLLATOR

Dépliez le dossier. Appuyez sur le siège vers le bas pour ouvrir le rollator. Tirez les deux leviers de frein vers le haut pour déverrouiller les freins.



SIÈGE

La hauteur du siège peut être réglée en relevant ou en abaissant l'ensemble des roues.

- Placez le rollator à la verticale sur ses roues.
- Poussez les deux leviers de frein vers le bas pour enclencher le frein.
- Retirez les clips en « C » du cadre avant.
- Réglez l'ensemble de roues avant à la hauteur souhaitée.
- Fixez-le à l'aide des clips en « C ».
- Appuyez sur le bouton poussoir de l'ensemble de roues arrière et placez-le à la hauteur souhaitée.
- Répétez l'opération de l'autre côté.
- Assurez-vous que toutes les roues touchent le sol pour vérifier qu'elles sont à la même hauteur.
- Tirez les deux leviers de frein vers le haut pour déverrouiller les freins.

TRANSPORTER LE ROLLATOR

Transportez le rollator en utilisant les poignées en caoutchouc et/ou les parties du cadre qui ne présentent pas de points de pincement.

LES ACCESSOIRES

Porte-canne

Le rollator est équipé d'un support pour canne/béquille. Placez votre canne/béquille dans la partie inférieure du support. Fixez-la au cadre du rollator à l'aide du ruban velcro.



Sac

Fixation

Soulevez le siège vers le haut pour faire apparaître la barre de soutien. Enroulez les huit sangles du sac autour de la barre du cadre et fixez-les à l'aide des attaches à pression.

Retrait

Soulevez le siège vers le haut pour faire apparaître la barre de soutien. Défaites les huit attaches à pression et retirez les sangles du cadre.



ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Ce rollator nécessitera un entretien périodique pour garantir son bon fonctionnement. La fréquence de l'entretien dépendra de l'utilisation que vous en faites. Certaines pièces doivent être vérifiées régulièrement pour détecter tout signe d'usure.

Pneus

Les pneus doivent être vérifiés régulièrement pour détecter une usure excessive. Si des signes d'usure importante apparaissent, remplacez les pneus dès que possible. Les pneus sont dotés de sculptures, qui doivent rester propres et ne pas présenter de signes d'usure excessive. Si les sculptures commencent à disparaître, il est recommandé de remplacer les pneus immédiatement, car cela peut affecter leur adhérence.

Freins

Lorsque vous recevez votre nouveau rollator, les freins auront été calibrés pour fonctionner efficacement et offrir une adhérence optimale. Cependant, avec le temps, ils peuvent se desserrer ou s'user. Si vous constatez l'un de ces problèmes, faites recalibrer les freins par votre revendeur.

Outils nécessaires pour régler le câble de frein :

- Clé de 8 mm
- Clé de 10 mm

Desserrez le contre-écrou (A) en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Réglez la tension du câble de frein en tournant le dispositif de réglage du frein (B). Serrez le contre-écrou en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



Cadre

Le cadre est la partie la plus importante de votre rollator et doit être maintenu en bon état. Avant chaque utilisation, vérifiez les points suivants :

1. Le cadre s'ouvre-t-il et se plie-t-il facilement ?
2. Le rollator roule-t-il droit ou tire-t-il d'un côté ?
3. Le cadre a-t-il subi des dommages ?
4. Le siège émet-il toujours un "clic" lorsqu'il est entièrement ouvert ?

Si vous constatez des problèmes avec l'un de ces points, ne pas utiliser le rollator et le faire réparer par un revendeur ou un technicien agréé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids maximum de l'utilisateur : 136 Kg

Dimensions hors-tout (LxlaxH) : 62-66,5 x 62 x 82-92/91-100 cm

Dimensions du siège (PxlaxH) : 24 x 36 x 52-60 cm

Dimension pliée (LxlaxH) : 23 x 62,5 x 92,5 cm

Distance entre les poignées : 44 cm

Dimensions du sac (PxlaxL) : 20 x 19 x 36 cm

Poids net : 6,4 kg

Poids brut : 7,4 Kg

Poids maximum du sac : 5 Kg

Matière du cadre : Aluminium

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Utilisez le rollator uniquement conformément à son usage prévu. Une utilisation inappropriée peut entraîner des risques de chute ou d'accident.
- Employez le rollator exclusivement sur des surfaces planes, stables et solides.
- Ne surchargez pas le sac de rangement : la charge maximale autorisée est de 5 kg.
- Évitez une exposition prolongée à des températures extrêmes : certaines parties du rollator peuvent devenir très chaudes ou très froides.
- N'utilisez jamais le rollator comme moyen de transport, il s'agit d'une aide à la marche.
- Remplacez sans délai toute pièce endommagée ou excessivement usée.
- Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement des freins afin d'assurer une utilisation en toute sécurité.
- Ne vous asseyez pas sur le rollator lorsque vous vous trouvez sur une pente ou un sol irrégulier.

NETTOYAGE

Le nettoyage de votre rollator est essentiel pour prolonger sa durée de vie. Ne pas utiliser de nettoyeurs ou de chiffons abrasifs, car ils pourraient réduire sa durée de vie. Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression, car cela pourrait causer des dommages irréversibles. Toutes les parties du rollator peuvent être nettoyées avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse chaude. Assurez-vous de sécher entièrement le rollator avant de le plier ou de le ranger. Le séchage doit être effectué uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec.

DURÉE DE VIE

La durée de vie prévue de ce produit est de cinq ans, sous réserve d'une utilisation conforme à sa fonction ainsi que du respect des instructions d'entretien et de maintenance. Un entretien régulier, une manipulation soigneuse et, le cas échéant, des réparations appropriées peuvent contribuer à prolonger significativement la durée de vie du produit. À l'inverse, une utilisation inadéquate ou un manque d'entretien peuvent réduire cette durée de vie. La durée de vie prévue n'est pas liée à la garantie du produit.

GARANTIE

La garantie légale de conformité du rollator est de 2 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie correspond à un emploi normal de ce dernier et ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces ou les défaillances dues à une mauvaise utilisation, à un manque d'entretien, à un non-respect des recommandations émises ou à une négligence de l'utilisateur.

En cas de défaut couvert par cette garantie, nous fournirons, des pièces ou remplacerons l'appareil. Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêt directs ou indirects. Tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.



Importé et distribué par : Amadis – 85110 Chantonnay – France



Obelis s.a.
Boulevard General Wahis 53 1030 Bruxelles, BELGIQUE

