

ROLLATOR 4 ROUES CARRY

mon-materiel-
medical-en-
pharmacie.fr

VOTRE
PHARMACIEN
VOUS CONSEILLE

Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Notice à conserver •
En cas de perte, vous la retrouverez sur www.mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr •
Référence produit : 49014

INTRODUCTION

Ces instructions fournissent aux utilisateurs et/ou aux aidants des informations sur l'utilisation sûre et efficace de ce produit, y compris le nettoyage, l'entretien et le fonctionnement. Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser ce produit. Ce produit peut être utilisé comme une aide à la marche. Il est équipé d'un siège, d'un dossier et d'un sac de rangement. Les modifications non autorisées et/ou l'installation de composants et d'accessoires tiers non approuvés ne sont pas autorisées. Ce rollator est adapté à une utilisation en extérieur.

DÉSCRIPTION DES PIÈCES




UTILISATION DU ROLLATOR

Ouverture : Pour ouvrir le rollator, vous devez tirer vers le haut la poignée située sur le siège. (image 1) Continuez à tirer sur la poignée du siège jusqu'à ce que les bras se verrouillent en position. Vous pouvez alors pousser les deux barres latérales jusqu'à ce que le siège soit plat et qu'un « clic » sonore confirme que le siège est verrouillé en position ouverte (image 2). Ne pas utiliser le siège sans entendre le « clic » (image 3).

Il est important de pousser le rollator dans le bon sens. Ne pas laisser un grand espace entre vous et le rollator, car il risque de vous échapper des mains et donc de provoquer une chute (images 4 et 5 ci-dessous)

Il est important que les poignées du rollator soient réglées à la bonne hauteur pour l'utilisateur (image 6). Pour déterminer la bonne hauteur, placez vos bras le long du corps et levez les poignées du rollator à la hauteur de vos poignets.

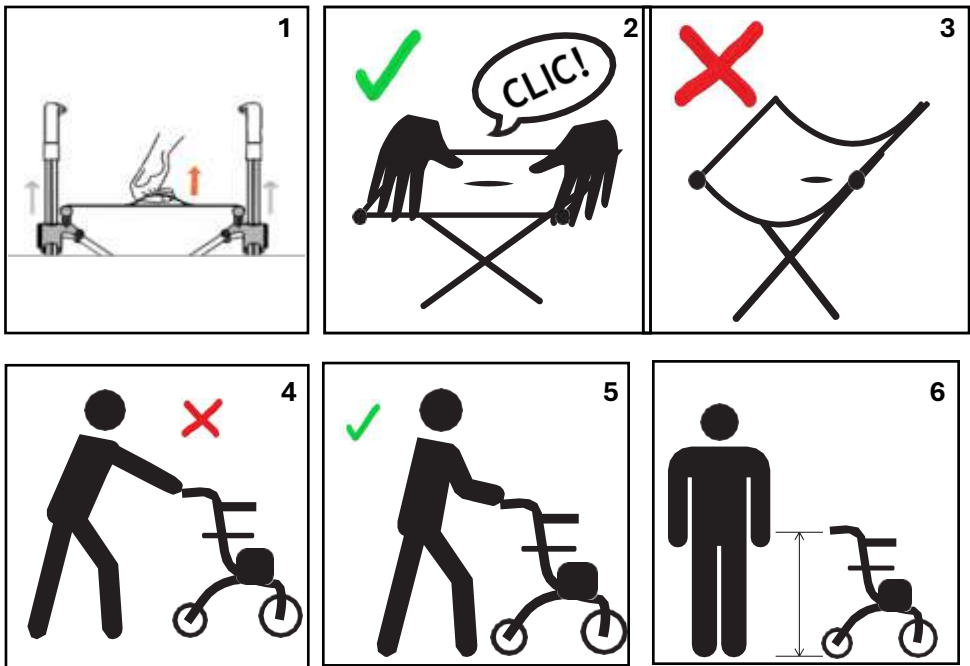

AJUSTER VOTRE ROLLATOR

Un certain nombre de pièces de votre rollator peuvent être réglées si nécessaire. Ces réglages s'effectuent comme indiqué ci-dessous :

Réglage des poignées :

Ajustez la hauteur des poignées en appuyant sur le bouton rouge qui se situe sous les poignées et en soulevant ou abaissant la poignée jusqu'à la hauteur souhaitée (image 7). Lorsque la poignée est à la hauteur la plus proche de la hauteur souhaitée, vous entendrez un « clic » et la poignée se verrouillera en position. Assurez-vous que les deux poignées sont à la même hauteur.



7

Image 7

Fixation du dossier

Le dossier peut être ajusté en hauteur pour vous offrir un confort optimal lorsque vous êtes assis sur le siège du rollator. Localisez la petite molette de chaque côté du cadre (image 8). Tournez la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour libérer le dossier et ajuster sa hauteur selon vos besoins. Une fois la hauteur souhaitée atteinte, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit complètement verrouillé (image 9).



Image 8



Image 9

Retrait du sac de rangement :

Avant de plier le rollator, vous pouvez retirer le sac de rangement si vous le souhaitez, mais ce n'est pas nécessaire pour le pliage. Pour retirer le sac faites-le simplement glisser des deux côtés des tubes du cadre (voir image 10). Pour remettre le sac dépliez-le, puis passez les sangles de chaque côté dans les crochets situés sous le siège.



Image 10

UTILISER LES FREINS

Freinage standard : Pour arrêter le rollator pendant que vous le poussez, tirez doucement les poignées de frein vers le haut, en direction des poignées, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Important : ne tentez pas de pousser le rollator lorsque les freins sont appliqués.

Frein de stationnement : Pour garer le rollator, poussez les poignées de frein vers le bas jusqu'à ce qu'elles se bloquent (voir image 11). Activez toujours le frein de stationnement avant de vous asseoir afin d'empêcher tout mouvement pendant que vous vous asseyez. Ne jamais : pousser le rollator lorsque quelqu'un est assis sur le siège et ne desserrez jamais les freins de stationnement lorsque le siège est utilisé.

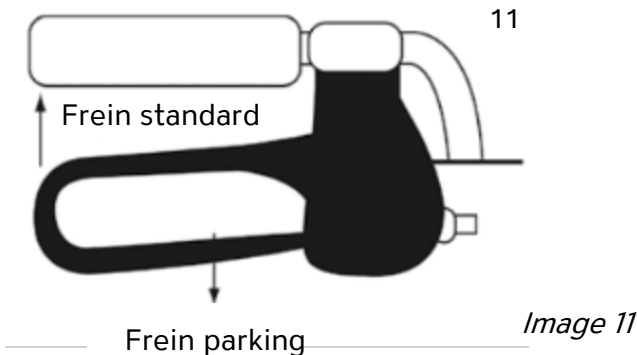





Image 11

PASSER UN TROTTOIR

Si vous devez traverser une route et qu'il n'y a pas de bordures abaissées, vous devrez suivre les étapes suivantes :

Monter une bordure :

- Poussez le rollator jusqu'à ce que les roues avant touchent la bordure.
- Soulevez doucement les roues avant à l'aide du passe-trottoir (voir images 12 et 13).
- Poussez vers l'avant jusqu'à ce que les roues avant soient complètement sur le trottoir (voir image 14).
- Abaissez doucement les roues avant et soulevez les roues arrière (voir image 15).
- Poussez le rollator jusqu'à ce que les roues arrière soient sur le trottoir, puis abaissez-les doucement (voir image 16).

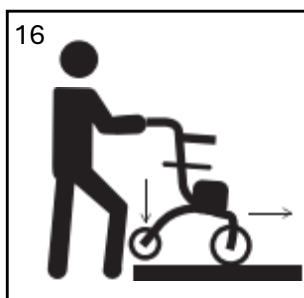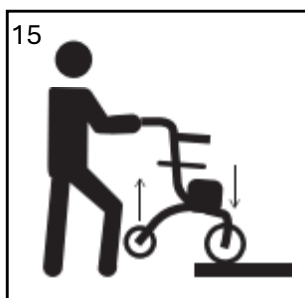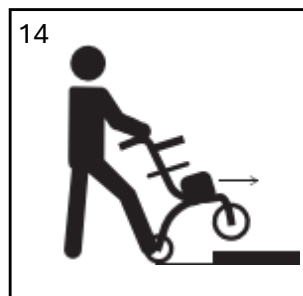

Descendre une bordure

- Poussez le rollator jusqu'à ce que les roues avant soient au-dessus de la route et abaissez-les doucement.
- Poussez vers l'avant jusqu'à ce que les roues arrière soient au-dessus de la route, puis abaissez-les doucement.
- Continuez à pousser jusqu'à atteindre le côté opposé de la route.

Important : Ne jamais placer de charge sur le siège lors de la montée ou de la descente d'une bordure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids maximum de l'utilisateur : 136 Kg

Longueur totale : 69 cm

Largeur totale : 61 cm

Hauteur totale : 83 – 96 cm

Hauteur sol/siège : 56 cm

Largeur du siège : 44 cm

Profondeur du siège : 22 cm

Longueur pliée : 69 cm

Largeur pliée : 27,5 cm

Hauteur pliée : 85 cm

Poids net : 8 Kg

Poids maximum du sac : 5 Kg

PLIER LE ROLLATOR

Pour plier le rollator, il y a quelques étapes simples à suivre :

1. Placez une main dans la sangle située sur le dessus du siège.
2. Tirez la sangle vers le haut, ce qui commencera automatiquement à fermer le cadre du rollator (voir l'image 17).
3. Poussez les côtés l'un contre l'autre pour qu'ils se rejoignent au centre.
4. Appuyez sur les poignées jusqu'à ce que la goupille de verrouillage se mette en place. Vous entendrez un « clic » lorsque la goupille de verrouillage aura correctement bloqué le rollator (image 18 et 19).



ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Ce rollator nécessitera un entretien périodique pour garantir son bon fonctionnement. La fréquence de l'entretien dépendra de l'utilisation que vous en faites. Certaines pièces doivent être vérifiées régulièrement pour détecter tout signe d'usure.

Pneus

Les pneus doivent être vérifiés régulièrement pour détecter une usure excessive. Si des signes d'usure importante apparaissent, remplacez les pneus dès que possible. Les pneus sont dotés de sculptures, qui doivent rester propres et ne pas présenter de signes d'usure excessive. Si les sculptures commencent à disparaître, il est recommandé de remplacer les pneus immédiatement, car cela peut affecter leur adhérence.

Freins

Lorsque vous recevez votre nouveau rollator, les freins auront été calibrés pour fonctionner efficacement et offrir une adhérence optimale. Cependant, avec le temps, ils peuvent se desserrer ou s'user. Si vous constatez l'un de ces problèmes, faites recalibrer les freins par votre revendeur.

Cadre

Le cadre est la partie la plus importante de votre rollator et doit être maintenu en bon état. Avant chaque utilisation, vérifiez les points suivants :

1. Le cadre s'ouvre-t-il et se plie-t-il facilement ?
2. Le rollator roule-t-il droit ou tire-t-il d'un côté ?
3. Le cadre a-t-il subi des dommages ?
4. Le siège émet-il toujours un "clic" lorsqu'il est entièrement ouvert ?

Si vous constatez des problèmes avec l'un de ces points, ne pas utiliser le rollator et le faire réparer par un revendeur ou un technicien agréé.

Roues

Avant chaque utilisation, vérifiez les roues pour vous assurer qu'elles tournent correctement. Les fourches des roues avant doivent également pivoter correctement pour le guidage. Si elles sont rigides, elles doivent être recalibrées. Les roues ne doivent pas vaciller lorsque vous poussez le rollator. Si vous constatez des signes de vacillement, cela peut indiquer que les roues se desserrent et doivent être vérifiées immédiatement.

Siège

Le siège ne doit montrer aucun signe d'usure. Si vous repérez des trous, un amincissement du tissu ou des déchirures, ne pas utiliser le siège, car il pourrait ne pas supporter votre poids et doit être remplacé.

NETTOYAGE

Le nettoyage de votre rollator est essentiel pour prolonger sa durée de vie. Ne pas utiliser de nettoyeurs ou de chiffons abrasifs, car ils pourraient réduire sa durée de vie. Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression, car cela pourrait causer des dommages irréversibles. Toutes les parties du rollator peuvent être nettoyées avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse chaude. Assurez-vous de sécher entièrement le rollator avant de le plier ou de le ranger. Le séchage doit être effectué uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec.

GARANTIE

La garantie légale de conformité du rollator est de 2 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie correspond à un emploi normal de ce dernier et ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces ou les défaillances dues à une mauvaise utilisation, à un manque d'entretien, à un non-respect des recommandations émises ou à une négligence de l'utilisateur.

En cas de défaut couvert par cette garantie, nous fournirons, des pièces ou remplacerons l'appareil. Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêt directs ou indirects. Tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.



Importé et distribué par : Amadis – 85110 Chantonnay – France





FR

Le rollator se recycle

A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

