

ROLLATOR 2 ROUES OLYMPIA

mon-materiel-
medical-en-
pharmacie.fr

VOTRE
PHARMACIEN
VOUS CONSEILLE

Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Notice à conserver •
En cas de perte, vous la retrouverez sur www.mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr •
Référence produit : 49016

INTRODUCTION

Ces instructions fournissent aux utilisateurs et/ou aux aidants des informations sur l'utilisation sûre et efficace de ce produit, y compris le nettoyage, l'entretien et le fonctionnement. Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser ce produit. Ce produit peut être utilisé comme une aide à la marche. Il est équipé d'un siège, d'un dossier et d'un sac de rangement. Les modifications non autorisées et/ou l'installation de composants et d'accessoires tiers non approuvés ne sont pas autorisées. Ce rollator est adapté à une utilisation en intérieur uniquement.

DÉSCRIPTION DES PIÈCES



LES COMPOSANTS

Retirez tous les éléments de l'emballage avant de placer les composants sur une surface plane. Contactez votre revendeur si des pièces manquent dans la boîte du produit.

Ensemble roue avant

Insérez l'ensemble « roue avant » dans la base du cadre avant. Fixez l'ensemble à la hauteur souhaitée en appuyant sur les boutons poussoir. Assurez-vous que les deux roues avant sont à la même hauteur.

**Ensemble embout arrière**

Insérez l'ensemble « embout arrière » dans la base du cadre arrière. Fixez l'ensemble à la hauteur souhaitée en appuyant sur les boutons poussoir. Répétez l'opération de l'autre côté.

**Assemblage des poignées**

Placez le rollator à la verticale sur ses roues. Insérez la poignée dans la partie supérieure du cadre. Fixez la poignée à la hauteur souhaitée à l'aide du bouton en forme d'étoile. Répétez l'opération de l'autre côté.

**Fixation et retrait du dossier**

Fixez le dossier au cadre en appuyant et en positionnant les boutons poussoir dans le support. Retirez le dossier en appuyant sur les boutons poussoir et en tirant le dossier vers le haut. Assurez-vous que le dossier est bien fixé avant d'utiliser le rollator comme siège.



DÉMONTAGE

Suivez les instructions de montage dans l'ordre inverse pour démonter le rollator.

RÉGLAGE DES POIGNÉES

Desserrez la molette en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirez la molette du support de poignée. Relevez ou abaissez la poignée à la hauteur souhaitée. Réinsérez la molette dans le support de poignée. Serrez la molette en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Répétez l'opération de l'autre côté.



Pour régler la bonne hauteur des poignées, tenez-vous debout derrière le rollator, les bras le long du corps. Réglez la hauteur des poignées de manière à ce qu'elles soient au niveau des poignets de l'utilisateur.

Assurez-vous que les deux poignées sont à la même hauteur avant d'utiliser le rollator.

PLIER LE ROLLATOR

Soulevez le dossier vers le haut pour le rabattre. Soulevez le siège vers le haut pour faire apparaître la barre de soutien. Tirez la barre de soutien vers le haut pour plier le rollator.



RÉGLER LA HAUTEUR DU SIÈGE

La hauteur du siège peut être réglée en relevant ou en abaissant l'ensemble des roues.

- Placez le rollator à la verticale sur ses roues.
- Appuyez sur le bouton poussoir de l'ensemble « roue avant » et placez-le à la hauteur souhaitée.
- Répétez l'opération de l'autre côté
- Appuyez sur le bouton poussoir de l'ensemble « embout arrière » et placez-le à la hauteur souhaitée.
- Répétez l'opération de l'autre côté
- Assurez-vous que toutes les roues touchent le sol pour vérifier qu'elles sont à la même hauteur.



SAC DE RANGEMENT

Fixation

Soulevez le siège vers le haut pour faire apparaître la barre de soutien. Enroulez les sangles du sac autour de la barre du cadre et fixez-les à l'aide des attaches à pression.

Retrait

Soulevez le siège vers le haut pour faire apparaître la barre de soutien. Défaites les attaches à pression et retirez les sangles du cadre.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions hors-tout (LxlaxH) : 60-65 x 60 x 78-87,5/85-95 cm

Dimensions du siège (PxlaxH) : 24 x 36 x 47-54 cm

Dimension pliée (LxlaxH) : 15 x 60 x 91 cm

Distance entre les poignées : 44 cm

Poids net : 4,5 kg

Poids maximum de l'utilisateur : 115 Kg

Poids maximum du sac : 5 Kg

NETTOYAGE

Le nettoyage de votre rollator est essentiel pour prolonger sa durée de vie. Ne pas utiliser de nettoyeurs ou de chiffons abrasifs, car ils pourraient réduire sa durée de vie. Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression, car cela pourrait causer des dommages irréversibles. Toutes les parties du rollator peuvent être nettoyées avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse chaude. Assurez-vous de sécher entièrement le rollator avant de le plier ou de le ranger. Le séchage doit être effectué uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec.

GARANTIE

La garantie légale de conformité du rollator est de 2 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie correspond à un emploi normal de ce dernier et ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces ou les défaillances dues à une mauvaise utilisation, à un manque d'entretien, à un non-respect des recommandations émises ou à une négligence de l'utilisateur

En cas de défaut couvert par cette garantie, nous fournirons, des pièces ou remplacerons l'appareil. Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêt directs ou indirects. Tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.



Importé et distribué par : Amadis – 85110 Chantonnay – France



Obelis s.a.
Boulevard General Wahis 53 1030 Bruxelles, BELGIQUE

