

PINCE DE PRÉHENSION AIMANTÉE



Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Notice à conserver • En cas de perte, vous la retrouverez sur www.mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr • Référence produit : 34009 (61cm) et 34010 (76cm)

Description :

Légère, robuste et résistante à l'usure, la pince est très facile à utiliser même en cas de troubles musculaires. Elle est idéale pour atteindre des objets hors de portée, qu'ils soient en hauteur ou par terre. Sa pince antidérapante assure une bonne prise même sur les objets lisses comme les verres. Elle dispose également d'un crochet pour attraper les petits objets, comme les clefs. Disponible en deux longueurs.

Utilisation :

Pointez la pince sur l'objet à ramasser, appuyez sur la gâchette et accrochez l'objet. La tête rotative permet d'attraper les objets à des angles différents. L'embout est doté d'un aimant pour ramasser les épingles, et autres pièces métalliques.

Description	Longueur	Poids	Référence
Standard	610 mm	180 g	34009
Long	760 mm	200 g	34010

Nettoyage :

Toutes les pièces doivent être nettoyées au moyen d'un chiffon trempé dans une solution de détergent ou de désinfectant ménager.

