

ROLLATOR 4 ROUES MISTY

mon-materiel-
medical-en-
pharmacie.fr

VOTRE
PHARMACIEN
VOUS CONSEILLE

Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Notice à conserver •
En cas de perte, vous la retrouverez sur www.mon-materiel-medical-en-pharmacie.fr •
Référence produit : 47313 (Misty Gris) et 49013 (Misty vert)

INTRODUCTION

Ces instructions fournissent aux utilisateurs et/ou aux aidants des informations sur l'utilisation sûre et efficace de ce produit, y compris le nettoyage, l'entretien et le fonctionnement. Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser ce produit. Ce produit peut être utilisé comme une aide à la marche. Il est équipé d'un siège et d'un dossier intégrés.

DÉSCRIPTION DES PIÈCES




UTILISATION DU ROLLATOR

Ouverture : Tirez sur les poignées des deux côtés pour écarter les montants (image 1). Appuyez sur les barres latérales jusqu'à ce que le siège soit plat et qu'un « clic » sonore confirme que le siège est verrouillé en position ouverte (image 2). Ne pas utiliser le siège sans entendre le « clic » (image 3).

Il est important que le rollator soit poussé dans le bon sens. Ne pas laisser un grand espace entre vous et le rollator, car il risque de vous échapper des mains et donc de provoquer une chute (images 4 et 5 ci-dessous)

Il est important que les poignées du rollator soient réglées à la bonne hauteur pour l'utilisateur (image 6). Pour déterminer la bonne hauteur, placez vos bras le long du corps et levez les poignées du rollator à la hauteur de vos poignets.

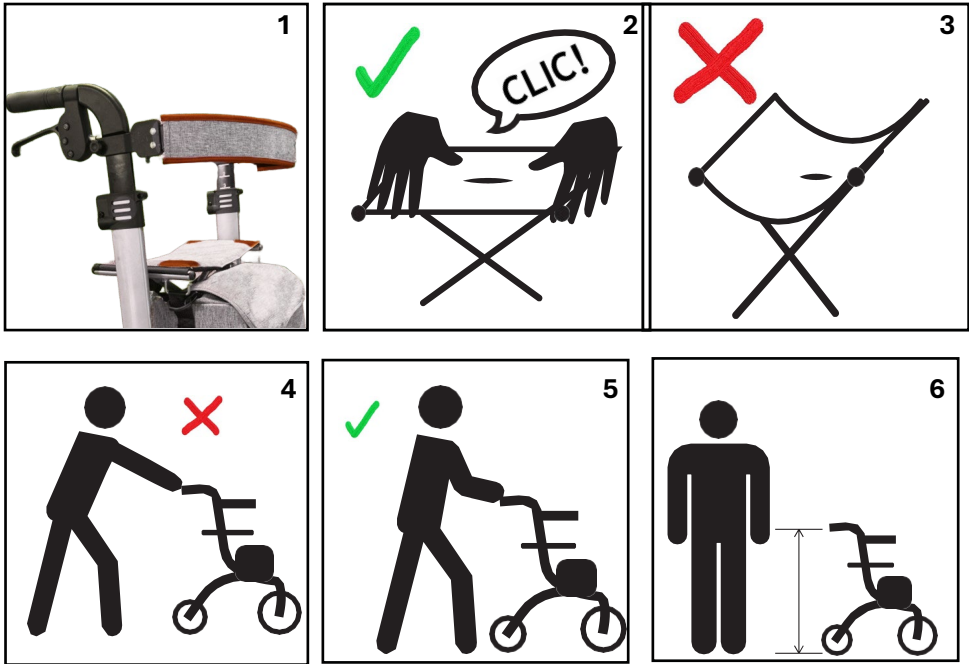

AJUSTER VOTRE ROLLATOR

Un certain nombre de pièces de votre rollator peuvent être réglées si nécessaire. Ces réglages s'effectuent comme indiqué ci-dessous :

Réglage des poignées :

Ajustez la hauteur des poignées en appuyant sur les boutons et en les déplaçant à la hauteur souhaitée (Voir l'image 7). Assurez-vous que les deux poignées sont à la même hauteur.



7

Image 7

Fixation du dossier

Poussez la base de fixation dans les tubes en aluminium de chaque côté. Déplacez la base de fixation vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit à la bonne hauteur. Insérez le bouton et serrez-le (image 8)

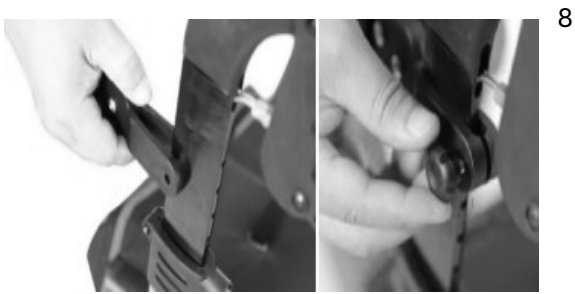


Image 8

Retrait du sac de rangement :

Lors du pliage du rollator, il est possible de retirer le sac de rangement si vous le souhaitez, bien que cela ne soit pas nécessaire pour le pliage du rollator. Pour retirer le sac, suivez ces étapes simples et rapides : Le sac peut facilement glisser des deux côtés des tubes du cadre. (image 9).

Pour mettre le sac, dépliez-le et enfiler la sangle des deux côtés dans le crochet situé sous le siège.




Image 9

UTILISER LES FREINS

Si vous souhaitez arrêter le rollator pendant que vous le poussez (frein standard), tirez doucement les poignées de frein vers le haut (vers la poignée), jusqu'à ce que le rollator s'arrête. N'essayez pas de pousser le rollator pendant que les freins sont appliqués.

Frein parking ou de stationnement : si vous voulez garer le rollator, poussez les poignées de frein vers le bas jusqu'à ce qu'elles se bloquent. (image 10). Les freins de parking doivent être activés avant de s'asseoir sur le rollator afin de l'empêcher de bouger pendant que vous vous asseyez.

N'essayez jamais de pousser le rollator si l'utilisateur se trouve sur le siège. Ne desserrez jamais les freins parking lorsque le siège est utilisé.

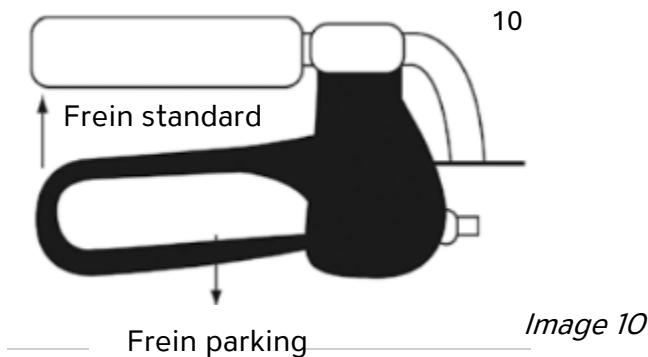

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids maximum de l'utilisateur : 136 Kg
Longueur totale : 70 cm
Largeur totale : 66 cm
Hauteur totale : 83.5 - 96.5 cm
Largeur pliée : 23 cm
Distance entre les poignées : 48 cm
Hauteur sol/siège : 58 cm
Largeur du siège : 45 cm
Profondeur du siège : 17,5 cm
Poids total - avec sac : 8.9 Kg
Diamètre des roues : 10 pouces à l'avant, 8 pouces à l'arrière
Poids maximum du sac : 5 Kg
Température de stockage +5°C - +41°C
Humidité de stockage 30% - 70%

PLIER LE ROLLATOR

Pour plier le rollator, il y a quelques étapes simples à suivre :

1. Placez une main dans la sangle située sur le dessus du siège.
2. Tirez la sangle vers le haut, ce qui commencera automatiquement à fermer le cadre du rollator (voir l'image 11 ci-dessous).
3. Poussez les côtés l'un contre l'autre pour qu'ils se rejoignent au centre.



Image 11

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Ce rollator nécessitera un entretien périodique pour garantir son bon fonctionnement. La fréquence de l'entretien dépendra de l'utilisation que vous en faites. Certaines pièces doivent être vérifiées régulièrement pour détecter tout signe d'usure.

Pneus

Les pneus doivent être vérifiés régulièrement pour détecter une usure excessive. Si des signes d'usure importante apparaissent, remplacez les pneus dès que possible. La version extérieure est dotée de sculptures sur les pneus, qui doivent rester propres et ne pas présenter de signes d'usure excessive. Si les sculptures commencent à disparaître, il est recommandé de remplacer les pneus immédiatement, car cela peut affecter leur adhérence.

Freins

Lorsque vous recevez votre nouveau rollator, les freins auront été calibrés pour fonctionner efficacement et offrir une adhérence optimale. Cependant, avec le temps, ils peuvent se desserrer ou s'user. Si vous constatez l'un de ces problèmes, faites recalibrer les freins par votre fournisseur ou un technicien qualifié.

Cadre

Le cadre est la partie la plus importante de votre rollator et doit être maintenu en bon état. Avant chaque utilisation, vérifiez les points suivants :

1. Le cadre s'ouvre-t-il et se plie-t-il facilement ?
2. Le rollator roule-t-il droit ou tire-t-il d'un côté ?
3. Le cadre a-t-il subi des dommages ?
4. Le siège émet-il toujours un "clic" lorsqu'il est entièrement ouvert ?

Si vous constatez des problèmes avec l'un de ces points, ne pas utiliser le rollator et le faire réparer par un revendeur ou un technicien agréé.

Roues

Avant chaque utilisation, vérifiez les roues pour vous assurer qu'elles tournent librement. Les fourches des roues avant doivent également pivoter correctement pour le guidage. Si elles sont rigides, elles doivent être recalibrées. Les roues ne doivent pas vaciller lorsque vous poussez le rollator. Si vous constatez des signes de vacillement, cela peut indiquer que les roues se desserrent et doivent être vérifiées immédiatement.

Siège

Le siège ne doit montrer aucun signe d'usure. Si vous repérez des trous, un amincissement du tissu ou des déchirures, ne pas utiliser le siège, car il pourrait ne pas supporter votre poids et doit être remplacé.

NETTOYAGE

Le nettoyage de votre rollator est essentiel pour prolonger sa durée de vie. Ne pas utiliser de nettoyeurs ou de chiffons abrasifs, car ils pourraient réduire sa durée de vie. Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression, car cela pourrait causer des dommages irréversibles. Toutes les parties du rollator peuvent être nettoyées avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse chaude. Assurez-vous de sécher entièrement le rollator avant de le plier ou de le ranger. Le séchage doit être effectué avec un chiffon doux et sec.

GARANTIE

Votre produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de fabrication pendant deux ans à compter de la date d'achat. Cet appareil a été fabriqué selon des normes rigoureuses et a été soigneusement inspecté. Cette garantie reflète notre confiance dans les matériaux et la fabrication de nos produits ainsi que notre engagement envers nos clients.

En cas de défaut couvert par cette garantie, nous fournirons, des pièces ou remplacerons l'appareil. Cette garantie ne couvre pas les défaillances dues à une mauvaise utilisation ou à une négligence de l'utilisateur, ni à l'usure normale. La garantie ne s'étend pas aux composants non durables, tels que les accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont soumis à une usure normale et nécessitent un remplacement périodique.



Importé et distribué par : Amadis – 85110 Chantonnay – France

Obelis s.a.
Boulevard General Wahis 53 1030 Bruxelles, BELGIQUE

